

### Máscara Comunitária Reutilizável

Nível  
2

Máscaras têxteis destinadas à utilização por profissionais que não sendo da saúde estão expostos ao contacto com um elevado número de indivíduos.

#### Nota Importante!

As máscaras têxteis de nível 2 e nível 3, não são enquadradas como dispositivos médicos ou como equipamentos de proteção individual.

Nome do fabricante F.S. Confeções, Lda

Endereço Zona Industrial Porto de Mós, lote 15B | 2480-407 Porto de Mós

Referência FS\_MASK\_B

N.º lote | Mês | Ano de fabrico 101 | Setembro | 2020

Composição das matérias-primas camada exterior: 100% algodão | camada interior: 100% polipropileno

Identificação do tamanho (criança / adulto) Adulto

Frente




Verso



### Instruções de uso

- ▶ Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da COVID-19. Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>.
- ▶ A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com a Orientação da DGS n.º 019/2020, de 03/04/2020:
  - a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
  - b) Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora;
  - c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
  - d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
  - e) Recomenda-se uma utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo a máscara ser substituída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. A máscara retirada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
  - f) Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
  - g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;

- h) Em momento algum, a máscara deve ser guardada à volta do pescoço para ser reutilizada;
- i) A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na máquina de lavar;
- j) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.
- ▶ A máscara deverá ser lavada antes de nova utilização, devendo cumprir o número de ciclos de lavagem indicados pelo fabricante.
  - ▶ A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e conservação que se seguem.
  - ▶ A máscara deverá ser guardada em ambiente seco e resguardada de potencial contaminação (inicialmente ou após lavagem).
  - ▶ A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso.
  - ▶ Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.
  - ▶ No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavar a máscara nas condições definidas no ponto “conservação e limpeza” e após lavagem deve ser descartada como resíduo têxtil não perigoso. Caso opte por não lavar a máscara deverá descartar como resíduo biológico.

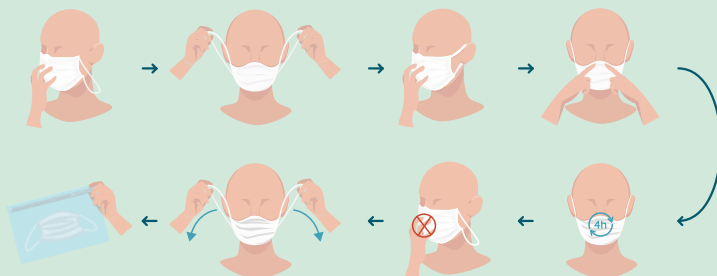

## ● Conservação e limpeza

**Nº** Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho de proteção da máscara: **25 lavagens**

As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente, após cada utilização. O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.



Permitida a lavagem a temperatura de 60°C



Proibido o uso de hipoclorito



Proibida a secagem em tambor



Não passar a ferro



Proibida a limpeza a seco

● Conformidade verificada através do relatório nº 8640C/2020 CITEVE