



Specialised
Orthotic
Services

By *drive*



Sistema de posicionamento 'P' Pod MANUAL DO UTILIZADOR

Todos os utilizadores do equipamento devem ter em conta este manual e o seu conteúdo.

CONTEÚDOS	PÁGINA
Índice	1
Notas de segurança e manutenção	
Introdução	2
1. Montagem do 'P' Pod	3
2. Posicionar o utilizador no 'P' Pod	4
3. Limpar o 'P' Pod	5 & 6
4. Apoio de cabeça rebatível opcional	6
5. Base móvel 'P' Pod opcional	7
6. Tabuleiro de pé opcional	8
7. Apoio de pés opcional	9 & 10
8. Tabuleiro de colo opcional	10
9. Barra de atividades opcional	11
Se detetar uma falha ou dano	12
Especificações	13 & 14
Detalhes de contacto	verso

NOTAS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO

- Assegure-se que o assento está apertado seguramente ao casulo, antes de usar.
- Assegure-se que a faixa pélvica e cintos (se instalados) estão seguros ao redor do utilizador, quando em uso.
- **NUNCA** deixe o 'P' Pod perto de alguma chama livre (p. ex. lareira aberta).
- **NUNCA** remova as bolas de polistireno do saco selado.
- **NUNCA** deixe ninguém, sem vigia, no 'P' Pod.
- Assegure-se de que as faixas de retenção da base móvel do 'P' Pod estão fixas no local apropriado ao usar o 'P' Pod com a base móvel opcional 'P' Pod.

MANUTENÇÃO

- Uma vez por semana remova o casulo e a bolsa de suporte do Puff e agite o mesmo para movimentar as esferas no seu interior, para que estas mantenham o volume e a forma.
- Periodicamente, verifique o desgaste ou rasgos nas capas e noutros materiais e que o Puff que contém as esferas não está aberto ou danificado, permitindo que as mesmas saiam do seu interior (ver notas de segurança acima).
- Preste particular atenção ao casulo para se certificar que se mantém em boa condição.

'P' Pod

(Classe 1 & Dispositivo feito por medida)

Introdução

- Este manual de utilizador para o 'P' Pod foi desenvolvido para dar orientações de uso e manutenção.
- O 'P' Pod fornece um suporte postural global de forma a que o peso do utilizador seja distribuído uniformemente por uma grande área. Isto melhora o conforto e relaxamento.
- É recomendado que a quantidade de tempo que um utilizador passa no 'P' Pod seja controlada, esta não deve ultrapassar as 3 horas contínuas.
- É aconselhado retirar o utilizador do 'P' Pod, depois desse período de tempo, para oferecer uma alteração da postura. Ao fazer isso, irá aumentar a tolerância do utilizador para o posicionamento no 'P' Pod diariamente.
- **Não deixe ninguém, sob nenhuma circunstância, sem vigia no 'P' Pod.**

Existem 2 tipos de 'P' Pod: standard ou moldados à medida.

Tamanhos standard 'P' Pod (Simétricos)

- Os assentos 'P' Pod standard estão disponíveis em diferentes tamanhos e podem ser usados por vários utilizadores que tenham medidas que se encaixam na gama de medidas do tamanho em questão.
- É sempre recomendado que as avaliações para os 'P' Pod standard sejam feitas com um terapeuta qualificado por marcação, se possível.

Moldados

- O 'P' Pod moldado é feito à medida, para atender às necessidades posturais específicas de um utilizador em específico.
- Isto irá requerer uma avaliação por um especialista em posicionamento qualificado.
- É sempre recomendado que as avaliações para um 'P' Pod Moldado seja feito por um terapeuta qualificado por marcação, se possível.
- Cada assento postural moldado é produzido para um indivíduo em particular e não deve ser utilizado por mais ninguém.

1. Montagem do 'P' Pod



Fig. 1a

- O 'P' Pod da SOS é constituído por 3 partes básicas: o casulo (base de assento), bolsa de suporte e puff (Fig. 1a).
- Primeiro fixe a bolsa de suporte ao puff, aderindo os velcros em ambas as partes, ou diretamente à base, dependendo do material (Fig. 1b).
- Coloque o casulo no local devido, alinhando a faixa frontal com o velcro (se disponível) no puff (Fig. 1c). Fixe todas as faixas de fixação no local devido do casulo (Fig. 1c & 1d).
- Depois de montar o 'P' Pod, configure-o numa posição reclinada antes de colocar o utilizador (Fig. 2c).
- **Nota:** O velcro apenas está disponível no casulo quando algum material que é usado o necessita.

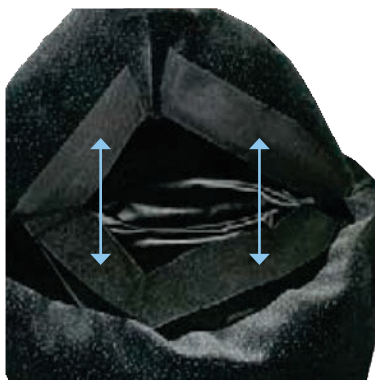


Fig. 1b



Fig. 1c



Fig. 1d

2. POSICIONAR O UTILIZADOR NO ‘P’ POD

- Recomenda-se que utilizadores acima dos 20kg sejam transferidos, através de uma grua de transferência, para o ‘P’ Pod. Levantar o paciente manualmente não é recomendado.
- É importante que todos os cuidadores estejam cientes das linhas de orientação de saúde e segurança para “transferências e manuseio”.
- TODOS os ‘P’ Pods são fornecidos com uma faixa pélvica de aperto por velcro. Antes de colocar o utilizador no ‘P’ Pod, certifique-se que a faixa pélvica está posicionada fora do assento, uma vez que irá ser difícil retirá-la de baixo do utilizador, se este se sentar por cima dela (Fig. 1c).
- Assim que o utilizador esteja no assento, assegure-se de que o deixa em segurança, colocando a faixa pélvica no local apropriado. (Fig. 2a) A faixa pélvica deve ser apertada firmemente ao redor do utilizador.
- **IMPORTANTE: O cliente deverá ter sempre a faixa pélvica apertada quando sentado no ‘P’ Pod.**
- Quando utilizar uma grua de transferência, tenha a certeza que segue as **instruções do fornecedor da grua de transferência** para dar o uso correto à mesma.
- Ao descer o utilizador para o ‘P’ Pod certifique-se que a anca/pélvis está localizada o mais atrás possível da base de assento e que o ‘P’ Pod está colocado numa posição reclinada (Fig. 2b).
- Pode ser decidido, na avaliação, que é necessária uma faixa adicional para o utilizador no ‘P’ Pod, para ajudar no controlo postural, se for o caso, todas as faixas adicionais e coletes devem estar no local apropriado, quando o utilizador estiver sentado no ‘P’ Pod (p. ex. Faixa inguinal Fig. 2c).
- Os ajustes na posição da unidade de assento, na base, podem ser feitos simplesmente agarrando a unidade de assento e movendo-a para uma posição diferente.
- **Por favor repare que, é necessário ter cuidado e atenção, quando colocar um utilizador no ‘P’ Pod, uma vez que é muito importante que o utilizador esteja corretamente posicionado para dar o máximo de conforto e suporte.**



Fig. 2a



Fig. 2b



Fig. 2c

3.1 LIMPAR O ASSENTO 'P' POD

- Ao longo do uso do assento 'P' Pod irá ser necessário efetuar a sua limpeza.
- A capa do casulo pode ser facilmente removida, puxando-a do casulo e passando a banda pélvica através dos orifícios. Com a capa do casulo retirada, a superfície interna do casulo pode ser facilmente limpa, usando detergentes suaves. O casulo é feito de espuma de células fechadas e é inerentemente à prova de água.
- Se o casulo permanecer levemente húmido, depois da limpeza, deixe-o apenas por um curto período de tempo à temperatura ambiente para secar.
- **NÃO COLOQUE O ASSENTO PERTO DE UMA FONTE DE CALOR OU CHAMA PARA SECAR, UMA VEZ QUE O CASULO É DE TERMOPLÁSTICO E PODE FICAR DANIFICADO PELO CALOR EXCESSIVO E PODE AFETAR A FORMA DO ASSENTO.**
- **NÃO UTILIZE PURGANTES OU SUBSTÂNCIAS CÁUSTICAS COMO LIXÍVIA PARA LIMPAR NENHUMA PARTE DO 'P' POD.**

3.2 LIMPAR AS CAPAS

- Para limpar as capas removíveis, por favor, atente na etiqueta de lavagem no interior das capas almofadadas.
- Para remover a capa do casulo, puxe-a simplesmente para fora do assento.
- Antes de lavar a capa do casulo, dobre as faixas de retenção de velcro (Fig.3.2a), para prevenir e não danificar o material da capa.
- Para remover a capa do apoio de cabeça rebatível: abra o fecho da capa e remova a espuma interior. **NÃO** tente lavar a espuma interior uma vez que esta é selada numa membrana especial que não pode ser removida sob nenhuma circunstância, para limpar a espuma simplesmente limpe a membrana plástica.
- Para a bolsa de suporte, casulo e apoio de pés: abra o fecho da capa e remova o saco de esferas de poliestireno (Fig.3.2b).
- Quando colocar de novo as capas no casulo, depois de limpar, certifique-se que a etiqueta interior está posicionada no topo do assento, para assegurar o correto alinhamento das faixas e o posicionamento correto do assento.
- **ALGUM DESVIO DAS INDICAÇÕES ACIMA PODEM AFETAR O RETARDAMENTO DE FOGO DA(S) CAPA(S).**



Fig. 3. 2a



Fig. 3. 2b

3.3. RETARDANTE DE CHAMAS

- Foram usados materiais retardantes de chamas, na construção deste sistema de assento.
- É importante que nenhum acelerante seja introduzido nos materiais (p. ex. Spray de cabelo, produtos de limpeza de tecidos, desodorizantes, polidores, etc...), uma vez que isto pode afetar adversamente o retardante de chamas do seu equipamento.

4. USO DO APOIO DE CABEÇA REBATÍVEL OPCIONAL

- O apoio de cabeça rebatível opcional fica pendurado acima do encosto do 'P' Pod, quando não está em uso, e colocado na posição devida, para oferecer uma alteração da posição da cabeça se necessário.
- Para usar o apoio de cabeça, levante o mesmo da parte traseira do 'P' Pod (**Fig. 4a**) e deixe que fique na posição mostrada (**Fig. 4b**).
- Se o apoio de cabeça estiver muito baixo/alto, este pode ser ajustado puxando ou empurrando as faixas através da fivela (**Fig. 4c**) para subir ou descer o apoio de cabeça.
- O apoio de cabeça pode ser removido para lavar as capas e etc., apertando as laterais das fivelas (**Fig. 4d**) e separando as duas partes da fivela.
- Para recolocar, basta realizar o ponto acima descrito ao revés.



Fig. 4a



Fig. 4b

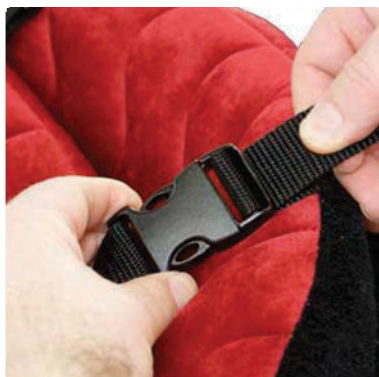


Fig. 4c



Fig. 4d

5. USO DA BASE MÓVEL OPCIONAL 'P' POD

- Antes de colocar o 'P' Pod na base móvel, certifique-se que o travão de pé está acionado nas rodas traseiras (Fig. 5a).
- É ESSENCIAL que o utilizador não esteja no 'P' Pod, antes de o colocar na base móvel. Isto também se aplica quando o 'P' Pod é removido da base móvel.
- Coloque o 'P' Pod na base móvel.
- Puxe as duas faixas traseiras por cima do encosto da base móvel e coloque-as no local devido, nas duas faixas de velcro (Fig. 5b).
- A remoção da base móvel é o procedimento oposto ao referido anteriormente.
- Para posicionar o manípulo na parte de trás da base móvel, solte os dois manípulos de aperto (Fig. 5c) e depois rode o manípulo para a posição desejada e reaperte os dois manípulos de aperto.
- O utilizador pode agora ser posicionado no 'P' Pod (ver pág. 4) e os travões serem desativados, se for necessário mover.
- **A base móvel é feita para uso no interior apenas e NÃO PARA SER USADO no exterior.**
- **A base móvel nunca deve ser usada com o utilizador sentado, para transporte num veículo a motor.**
- **Certifique-se que o travão está aplicado, enquanto a base móvel estiver parada.**
- **NUNCA DEIXE NENHUM UTILIZADOR NA BASE MÓVEL SEM VIGIA.**



Fig. 5a



Fig. 5b



Fig. 5c

6.1 USAR O TABULEIRO DE PÉ OPCIONAL

- Com o utilizador sentado no 'P' Pod, coloque o tabuleiro na frente do 'P' Pod como mostrado (Fig. 6.1a).
- Se o tabuleiro necessitar de ajustes, este pode ser subido/descido ou angulado.
- Para subir/descer o tabuleiro, solte os dois manípulos de aperto (Fig. 6.1b), coloque o tabuleiro na altura desejada e reaperte os manípulos de aperto.
- Para ajustar o ângulo do tabuleiro, solte os dois parafusos (Fig. 6.1c) com uma chave Allen (não disponibilizada com o assento) e regule o tabuleiro para o ângulo desejado e reaperte os manípulos de aperto.



Fig. 6.1a



Fig. 6.1b



Fig. 6c

6.2 USAR UM TABULEIRO QUANDO USA A BASE MÓVEL

- Quando utilizar o 'P' Pod numa base móvel, este vai ter locais standard para o uso de um tabuleiro.
- O tabuleiro pode ser colocado na base móvel, através de dois encaixes laterais, e fixado, através de dois manípulos de aperto "A" (fig. 6.2a).
- A altura do tabuleiro de pé pode ser alterada, soltando o parafuso "B" com uma chave Allen (não disponibilizada com o produto) e depois os manípulos de aperto "C" Fig. 6.2a) e subindo/descendo para a posição desejada. Volte a fixar os parafusos e os manípulos de aperto, quando finalizar o ajuste.

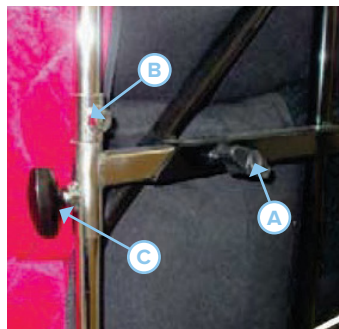


Fig. 6.2a

7.1 USO DO APOIO DE PÉS OPCIONAL

- Remova o casulo e a bolsa de suporte do puff. Coloque as duas faixas no topo do puff (Fig. 7.1a) e fixe o velcro à traseira do puff (Fig. 7.1b).
- Recoloque o casulo e a bolsa de suporte (ver página 3) ao puff e fixe as duas faixas no apoio de pés às duas faixas no puff, através das fivelas (Fig. 7.1c).
- O apoio de pés está corretamente fixo quando estiver como mostrado (Fig. 7.1d).
- O ajuste da altura do apoio de pés é feito, agarrando a fivela e puxando o topo das faixas, através da fivela (para levantar) ou o fundo das faixas (para baixar) (Fig. 7.1e).
- Remova o apoio de pés através dos dois cliques (Fig.7.1c)



Fig. 7.1a



Fig. 7.1b



Fig. 7.1c



Fig. 7.1d



Fig. 7.1e

7.2 USAR O APOIO DE PÉS NA BASE MÓVEL

- Quando usar o 'P' Pod na base móvel, a unidade vai ter uma localização fixa para o apoio de pés.
- O apoio de pés é colocado na base móvel, através de dois encaixes na parte frontal, e fixados, através dos manípulos de bloqueio "A" (Fig. 7.2a).
- A altura do apoio de pés pode ser alterada, soltando os manípulos de aperto "B" (Fig. 7.2a) e subindo/ descendo para a posição desejada. Aperte os manípulos quando finalizar.
- A profundidade do apoio de pés pode ser alterada, soltando os manípulos "c" (Fig. 7.2a) e deslizando para a frente/trás para o local desejado. Aperte os manípulos, quando finalizar.

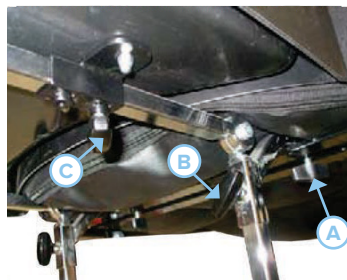


Fig. 7.2a

8. USO DO TABULEIRO DE COLO OPCIONAL

- Com o utilizador no 'P' Pod, coloque o tabuleiro no colo (Fig. 8a), certificando-se que o puff está sob o topo do tabuleiro.
- Levante as duas faixas traseiras do 'P' Pod e fixe as faixas do tabuleiro de colo nas duas faixas de velcro (Fig. 8b), coloque as faixas de assento no local no topo das faixas do tabuleiro.
- O tabuleiro está corretamente colocado, quando estiver como mostrado (Fig. 8c), a sua remoção é o processo reverso ao acima indicado, mas certifique-se que as faixas do assento são reposicionadas no 'P' Pod.
- O puff pode ser removido do tabuleiro e a capa removida para limpeza.



Fig. 8a



Fig. 8b



Fig. 8c

9. USO DA BARRA DE ATIVIDADES OPCIONAL

- Remova a barra do saco (se fornecido), coloque a base da barra no chão, com os pés apontados para baixo, e as duas barras em “T” na posição de pé (Fig. 9a).
- Deslize o topo da barra nas duas barras em “T” e aperte no local devido com os dois manípulos (Fig.9b).
- Posicione a barra de atividades montada acima do ‘P’ Pod e mova até à posição preferida, como mostrado na Fig. 9c.
- A altura da barra pode ser ajustada, através dos dois manípulos (Fig. 9b), e a profundidade, deslizando as barras em “T” ao longo das pernas da base.
- Os bloqueios no topo do arco podem ser reposicionados, desapertando o gancho (Fig. 9d) e mova-o ao longo da barra até à posição desejada, depois reaperte o gancho. Os bloqueios são usados para colocar os objetos de estimulação que podem ser pendurados no topo do arco.

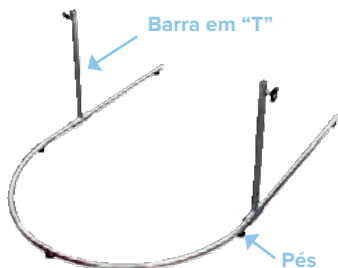


Fig. 9a

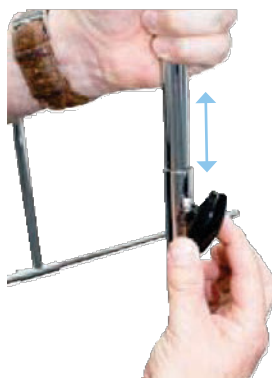


Fig. 9b



Fig. 9c



Fig. 9d

SE DETETAR UMA FALHA OU DANO

1. SE DETETAR UMA FALHA OU DANO NO EQUIPAMENTO, REPORTE DE IMEDIATO.
2. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA EXISTE ALGUMA MODIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO A SER FEITA POR OUTRA PESSOA A NÃO SER PELA SPECIALISED ORTHOTIC SERVICES LTD (veja os detalhes de contacto anexados).
3. PARA CONTACTAR A SPECIALISED ORTHOTIC SERVICES LTD, POR FAVOR, CONSULTE A INFORMAÇÃO INCLUÍDA NESTE MANUAL DE UTILIZADOR.

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

Dentro do período de garantia

Todos os sistemas de posicionamento produzidos pela Specialised Orthotic Services Ltd. têm garantia das partes principais de 12 meses, excluindo as capas e as faixas que têm 3 meses, quando usadas devidamente. Se durante este período o produto desenvolver algum defeito e precisar de reparação, contacte a SOS (por favor, veja o fim do manual do utilizador para detalhes). Também pode contactar o seu serviço local de cadeira de rodas a respeito de alguma falha que requeira atenção.

Fora do período de garantia

Para qualquer bem que necessite de reparação ou atenção, após o período de garantia, pode ser feita uma avaliação com o custo do trabalho requerido para efeitos de reparação. Caso aceite o orçamento, a reparação será efetuada.

Uso indevido ou negligência

As reparações necessárias que resultem de uso indevido ou negligência, dentro ou fora do período da garantia, terão um custo associado.

DIRETIVA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 93/43 EEC

A Specialised Orthotic Services Ltd. de acordo com a Diretiva de Dispositivos Médicos tem a obrigação de investigar e tomar ações corretivas em dispositivos com defeito. Para nos ajudar com este procedimento gostaríamos da sua ajuda para ir ao encontro a esta obrigação informando-nos o mais cedo possível e disponibilizar o dispositivo para inspeção o mais depressa possível após detetar o defeito.




Nós estamos responsabilizados a notificar a Autoridade Competente de alguns tipos de incidentes entre 10 a 30 dias.

Como parte do nosso sistema de qualidade temos procedimentos estabelecidos para lidar com incidentes deste tipo e gostaríamos da sua notificação via telefone, fax ou e-mail que estão no final deste manual de utilizador.

ESPECIFICAÇÕES


'P' POD SIMÉTRICO DIMENSÕES em mm

Tamanho 'P' Pod	Micro	1	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6
Largura da anca	180	220	250	260	260	270	310	310	360	370	420
Largura do tronco	160	190	220	240	250	240	270	270	320	330	340
Profundidade	120	210	230	260	290	290	330	350	350	420	430
Altura da axila	140	220	260	260	290	290	320	330	380	360	420
Altura do ombro	230	340	370	400	420	440	440	470	510	540	550
Altura da cabeça	360	430	500	560	560	620	620	660	660	700	730

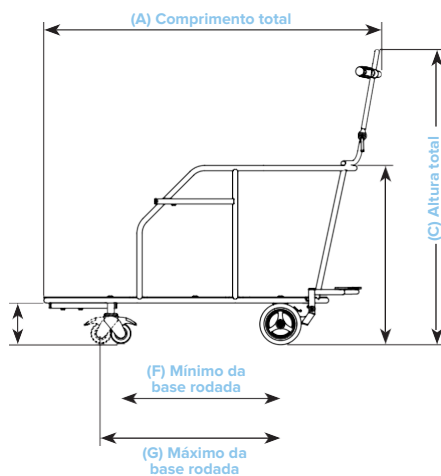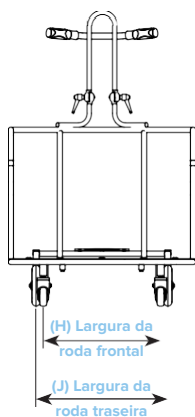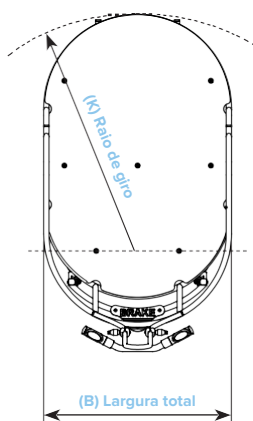

BASE MÓVEL "P" POD DIMENSÕES em mm


TAMANHO	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Pequeno	1030	580	1060	550	150	490	560	385	450	675
Médio	1120	680	1070	650	150	590	660	425	480	780
Grande	1225	680	1070	650	150	590	660	425	480	860
Extra Grande	1325	680	1070	650	150	690	760	425	480	960

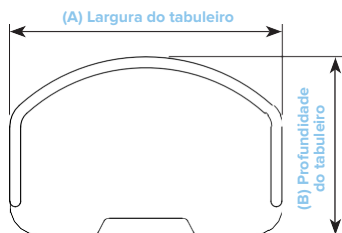

TAMANHOS DO TABULEIRO DE COLO "P" POD DIMENSÕES em mm


TAMANHO	A	B
Micro	473	310
Pequeno	523	390
Médio	618	443

ESPECIFICAÇÕES (Cont.)

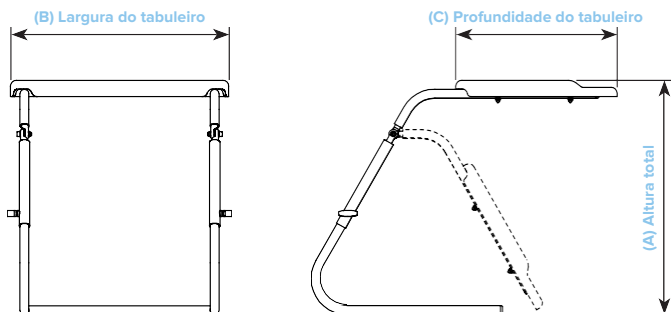

TAMANHOS DO TABULEIRO 'P' POD DIMENSÕES em mm

TAMANHO	A	B	C
Pequeno	460 - 575	525	545
Médio	310 - 810	635	595
Grande	760 - 1000	740	695

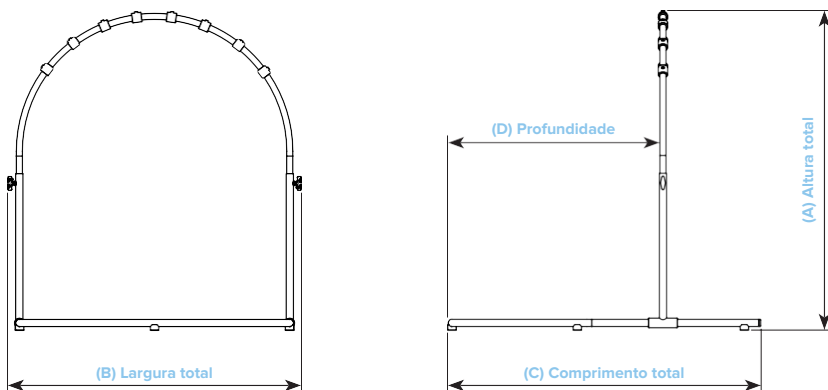

TAMANHOS DA BARRA DE ATIVIDADES 'P' POD DIMENSÕES em mm

TAMANHO	A	B	C	D
Pequeno	790 - 1120	770	980	400 - 880
Médio	1170 - 1500	770	980	400 - 880

Se necessitar de cópias futuras deste manual ou mais detalhes relativos a algum do seu conteúdo, por favor, contacte-nos (aplica-se direitos de autor):

Etiqueta de identificação



Specialised
Orthotic
Services
By *drive*

Specialised Orthotic Services Ltd
Unit 126-127,
Fauld Industrial Park, Fauld Lane
Tutbury, Staffordshire
DE13 9HS

Tel: 01283 520400
Sales Enquiries: 01283 812860
Email: enquiries@specialorthotic.com
Web: www.specialisedorthoticservices.co.uk