



Splashy Big

Manuale D'Uso



Family Freedom



Leia, por favor, cuidadosamente todas as instruções antes de usar o Splashy BIG. Essas instruções também podem ser descarregadas do nosso site **www.fireflyfriends.com**, juntamente com vídeos, diagramas e outros downloads úteis.

Conteúdos

01 Utilização prevista	p.117
02 Declaração de conformidade	p.118
03 Termos de garantia	p.118
04 Informação de segurança	p.119
05 Informação sobre limpeza e cuidados	p.120
06 Inspeção e assistência técnica do produto	p.122
07 Orientações importantes	p.123
08 Reedição de produtos	p.123
09 Instruções para utilização	p.124
10 Informação de tamanho	p.143

SECÇÃO 01: Utilização prevista

A assento para banho Splashy BIG destina-se a fornecer apoio para crianças com deficiência que necessitam de encosto de cabeça e tronco durante o uso da banheira. Para estrutura, segurança e suporte, é essencial que o Splashy BIG esteja sempre ligado à unidade de base do fixador ao piso.

O Splashy BIG é desenhado para crianças com idades entre aproximadamente 7 e 14 anos e com um peso máximo de 55 kg (121 lbs).

O encosto, a base do assento e a unidade base do fixador ao piso devem encaixar-se em conjunto facilmente e de forma segura - consulte a Secção 09 deste manual para mais instruções.



As crianças não devem ser deixadas nunca sozinhas / sem supervisão no assento de banho Splashy BIG, pois correm o risco de se afogar ou magoar.

Recomendamos que um adulto realize inspeções ao produto de acordo com a Secção 06 deste manual do utilizador para garantir que o produto é seguro para usar. A Firefly Friends Ltd. e a James Leckey Design não se responsabiliza se o produto for utilizado contrariamente aos fins previstos. Em caso de dúvida contacte o Serviço ao Cliente da Firefly para UK 0800 318265 ou ROI 1800 626020

As atividades diárias testadas e aprovadas pela Firefly Friends Ltd e pela James Leckey Design Ltd são:

1. In the bath or shower
2. Para atividades lúdicas na água

A utilização do Splashy BIG fora da casa de banho (como no jardim ou na praia) deve ser avaliado com antecedência. Lembre-se de que o Splashy BIG contém ligações do assento de trabalho ao piso que podem ser afetadas por pequenas partículas e/ou obstruções (como terra, relva ou areia). Se o Splashy BIG entrar em contacto com qualquer substância que possa afetar as ligações do assento ao piso, certifique-se de que as mesmas são bem lavadas após a utilização. Consulte a Secção 04 para Informações de Segurança e a Secção 05 para mais orientações sobre a limpeza e os cuidados.

SECÇÃO 02: Declaração de conformidade

A James Leckey Design Ltd., como fabricante com responsabilidade exclusiva pela marca Firefly, declara que o Splashy BIG está em conformidade com os requisitos da diretiva de dispositivos médicos 93/42/CEE. O Splashy BIG tem uma marcação CE como Dispositivo Médico de Classe 1

SECÇÃO 03: Termos de garantia

A garantia para o Splashy BIG aplica-se apenas quando o produto é usado de acordo com a utilização prevista, cumprindo todas as especificações do fabricante. Está incluído um ano de garantia com este produto fabricado pela James Leckey Design Ltd.

Os produtos podem ser devolvidos para reparação ou substituição ao abrigo da garantia até 12 meses após

a sua receção. Uma vez que entre em contacto connosco, organizaremos a recolha dos produtos por nossa conta e, uma vez devolvidos procederemos à sua reparação/substituição e respetiva devolução num prazo de 14 dias. Em todos os casos, é de a responsabilidade do cliente garantir que os produtos são devolvidos devidamente, corretamente embalados, de preferência, na embalagem original.

SECÇÃO 04: Informação de segurança

1. Leia sempre as instruções do utilizador completas antes de usar o produto.
2. As crianças não devem ser deixadas nunca sozinhas / sem supervisão neste produto.
3. Se usar o Splashy BIG na praia, nunca deixe o seu filho sozinho próximo do mar.
4. Antes da utilização, verifique se todos os componentes do

- Splashy BIG estão montados de forma segura e de acordo com as instruções do utilizador. O Splashy BIG deve ser ligado sempre à unidade base do fixador ao piso e colocado sobre uma superfície firme, sólida e estática. Nunca use o Splashy BIG sobre uma superfície inclinada.
5. O peso máximo do utilizador para o Splashy BIG é de 55 kg (121 lbs). Este peso não deve ser excedido nunca.



O não cumprimento destas instruções pode colocar a criança em risco.

6. O Splashy BIG contém peças que podem representar risco de asfixia para crianças pequenas. Verifique se todos os componentes estão fixos e seguros corretamente antes de usar - incluindo fechos e tiras.
 7. Não modifique o Splashy BIG ou use componentes diferentes dos componentes Firefly aprovados com o Splashy BIG. Isto pode colocar o seu filho em risco e também pode invalidar a sua garantia.
 8. Ao usar o Splashy BIG em ambientes que podem ter terra/areia/relva ou componentes pequenos, limpe sempre as ligações do assento ao piso após cada utilização para evitar obstruções. Para religar o fixador ao piso ao assento, consulte a Secção 09.2.7
 9. Após o uso, deixe o Splashy BIG secar completamente antes de o guardar cuidadosamente. O Splashy BIG deve ser mantido afastado de todas as fontes diretas de calor, incluindo chamas, cigarros, aquecedores elétricos e a gás.
 10. Limpe o produto regularmente de acordo com a Secção 05 deste manual do utilizador.
 11. Realize verificações de manutenção regularmente para garantir que o seu produto está em boas condições de funcionamento. O Splashy BIG não deve ser usado se tiver peças avariadas.
 12. Se tiver dúvidas sobre o uso seguro do Splashy BIG ou sobre a unidade base do fixador ao piso, ou se alguma das peças falhar, interrompa imediatamente a utilização do produto e entre em contacto com o serviço ao cliente da Firefly no Reino Unido 0800 318265 ou ROI 1800 626020.
 13. Quaisquer itens promocionais fornecidos com o Splashy BIG não devem ser usados sem supervisão.
 14. Ao usar o estabilizador, assegure-se de que este se encontra totalmente bloqueado.
 15. Não nos é possível disponibilizar aconselhamento especializado sobre movimentação e manuseamento, pois as circunstâncias serão diferentes para cada família. Para orientação sobre movimentação e manuseamento, fale com o seu terapeuta.
- A movimentação e manuseamento inadequados podem causar risco de ferimentos para si e para o seu filho.**
- Recomendamos que consulte o seu terapeuta sobre a movimentação e o manuseamento antes de o usar.

SECÇÃO 05: Informação sobre limpeza e Cuidados

Como manter

- Quando limpar o Splashy BIG, recomendamos que use apenas água morna e um detergente não abrasivo. Nunca use solventes orgânicos ou fluidos de limpeza a seco.
- Não lave na máquina nem limpe a vapor os componentes de espuma do Splashy BIG, pois isto pode fazer com que a espuma perca a forma e deforme.
- Recomendamos que você não use nenhum tipo de loção prescrita na água do banho durante o processo de banho, pois pode contribuir para a desagregação dos materiais do Splashy BIG.
- Limpe a superfície do banho de qualquer resíduo ou sujidade, antes de prender o fixador ao piso, certificando-se de que os pés de borracha ficam bem seguros na banheira.
- Para remover areia/terra/relva ou alguma pequena partícula que possa estar nas ligações do fixador ao piso para o assento, basta um ligeiro toque na área para incentivar a queda dessas mesmas partículas. Enxaguar bem para garantir que não existem partículas acumuladas no interior das ligações. Para obstruções persistentes no fixador ao piso, o trinco pode ser empurrado com o dedo para remover uma partícula e ajudar na sua libertação.

- Se o seu assento de banho entrar em contacto com água salgada, enxague bem todas as peças com água limpa e fresca.

Arneses de 5-pontos

O arnês de 5 pontos do Splashy BIG pode ser removido e limpo com água e sabão.

Unidade base do fixador ao piso


1. Certifique-se de que a unidade base do fixador ao piso do estabilizador e o estabilizador são limpos após cada utilização para garantir a aderência ao fundo da banheira.
2. Podem ser usados sabão e água na limpeza diária.
3. Não use solventes para limpar a unidade base do fixador ao piso.

Base em espuma e suportes do assento do Splashy BIG


1. Podem ser usados sabão e água na limpeza diária.
2. As capas em espuma EVA podem ser removidas e lavadas periodicamente para evitar a acumulação de resíduos e sujidade.

As capas em espuma EVA do Splashy BIG podem ser removidas e lavadas regularmente.





1. As capas EVA são fixas por oito ganchos. Dois na parte de trás do assento e seis na base do mesmo.
2. Desaperte todos os ganchos manualmente (não usar ferramentas)
3. Lavar com água e sabão.
4. Confirmar se as capas estão totalmente secas antes de as voltar a colocar.
5. Certifique-se de que todos os ganchos ficam engatados quando voltar a colocar as capas.

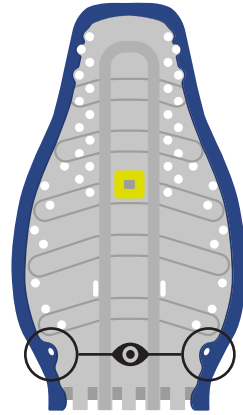

Localização dos ganchos

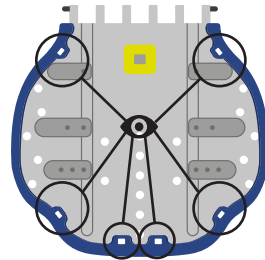

Se o Splashy BIG for usado em ambientes fora da casa de banho (como a praia ou o jardim), é importante enxaguá-lo após cada utilização para que fique livre de partículas/obstruções que possam afetar os seus mecanismos de trabalho. Para ligar o fixador ao piso do assento, consulte a Secção 09.2.6

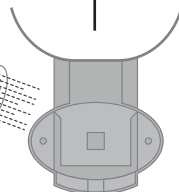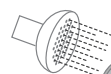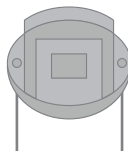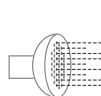

SECÇÃO 06: Inspeção e assistência técnica do produto

Recomendamos que sejam efetuadas diversas verificações ao Splashy BIG antes da sua utilização para garantir que o produto é seguro.

As verificações recomendadas são listadas abaixo:

1. Assegure-se de que o encosto e a base do assento do Splashy BIG foram encaixados de forma segura, conforme detalhado na Secção 09 deste manual.
2. Verifique se o Splashy BIG está bem fixo na unidade base do fixador ao piso e certifique-se de que está estável e seguro na banheira antes de colocar a criança. (NB: O estabilizador não é necessário para a utilização do Splashy BIG na banheira.)
3. Assegure-se de que o arnês de 5 pontos e os suportes do amortecedor estão fixos com segurança ao Splashy BIG usando os acessórios de fecho.
4. Verifique se existem sinais de desgaste ou danos no arnês de 5 pontos e nos suportes do amortecedor.
5. Verifique se existem rachas ou danos nas fivelas e fechos.

6. Verifique se os trincos e as ligações do Splashy BIG e do fixador ao piso estão livres de sujidade ou detritos e sem sinais de desgaste.



Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Firefly ou se alguma estiver danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e contacte com nosso departamento de serviço ao cliente o mais rápido possível.

Para todas as questões relacionadas com assistência técnica, consulte o site da Firefly, www.fireflyfriends.com, ou entre em contacto com a Firefly através do endereço customer.enquiries@fireflyfriends.com.

SECÇÃO 07: Orientações importantes

Certifique-se de que o Splashy BIG está bem assente na banheira. Incline o encosto para uma posição de inclinação média para as crianças que podem ajudar com as transferências ou que são levadas para a banheira. Consulte a secção 09.6.

A inclinação completa deve ser usada para crianças que são içadas para a banheira. Isto deve facilitar as transferências para o Splashy BIG.

Aconselhamos a instalação do arnês de 5 pontos e dos suportes do amortecedor no Splashy BIG antes de colocar a criança no assento, embora estes possam ser ajustados, se necessário, se o seu filho se encontrar na banheira. Tenha cuidado e monitorize o seu filho de perto durante a realização das alterações no assento de banho.


Colocar e retirar uma criança do banho é uma atividade que pode causar lesões nas suas costas. Recomendamos que procure orientação do seu terapeuta relativamente às transferências seguras (técnicas de movimentação e manuseamento) do seu filho para dentro e para fora do banho.

SECÇÃO 08: Reutilização de Produtos Firefly

Certifique-se de que o produto foi limpo corretamente de acordo com a Secção 5 deste manual. Verifique se foi fornecida uma cópia do manual do utilizador com o produto. Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Firefly ou se alguma estiver danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e contacte com nosso departamento de serviço ao cliente o mais rápido possível para UK 0800 318265 ou ROI 1800 626020.

SECÇÃO 09: Instruções para utilização

09.1 Peças do Splashy BIG

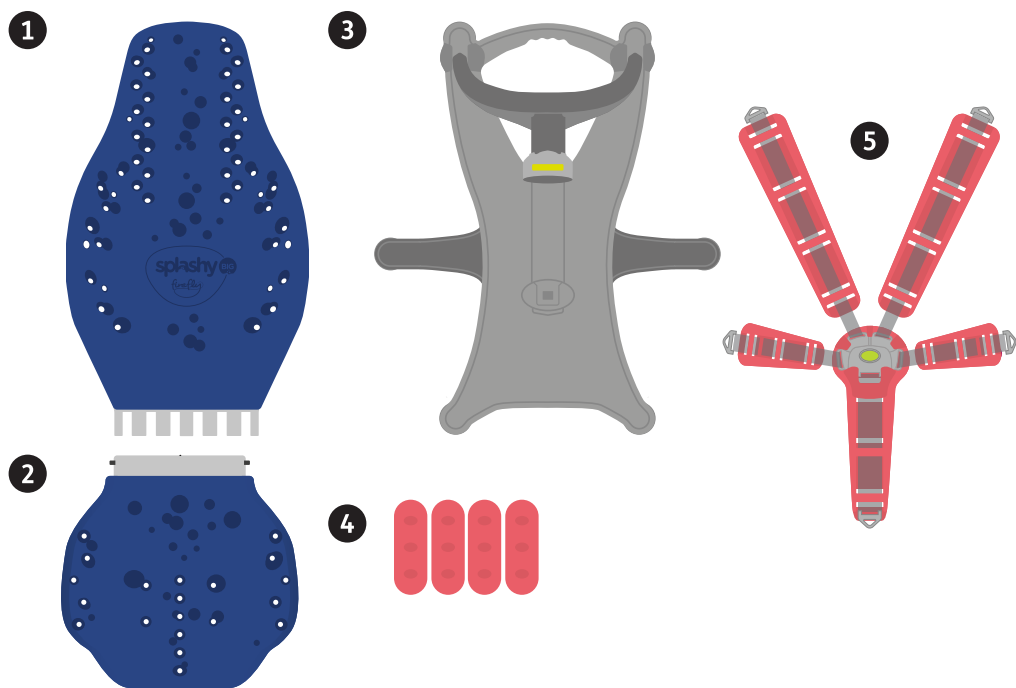

O seu Splashy BIG é entregue com as seguintes peças:


- 1 1x Encosto
- 2 1x Base assento
- 3 1x Unidade base do fixador ao piso
- 4 4x Suportes amortecedor
- 5 1x Correia virilha e 4x Tiras arneses

09.2 Montagem do Splashy BIG

- Recomendamos a realização de uma “simulação a seco” com o seu filho no Splashy BIG a usar roupas leves, para garantir a colocação correta do cinto e dos suportes do amortecedor.
- Certifique-se de que a sua banheira está limpa e livre de qualquer resíduo antes de colocar o fixador ao piso na banheira.
- O seu Splashy BIG DEVE ser montado ANTES de encher a banheira com água. Recomendamos que encha a banheira com uma mistura de água quente e fria para evitar danificar o Splashy BIG.
- Consulte a secção 09.6.1 para obter algumas orientações sobre como posicionar o braço de inclinação no Splashy BIG.

09.2.1 Colocação do fixador ao piso

O fixador ao piso deve ser sempre colocar sobre uma superfície firme, sólida e estática. Ao colocar o fixador ao piso sobre a superfície escolhida, é vital que todos os pés de borracha fiquem em contacto com a superfície. Embora o estabilizador não seja necessário ao usar o Splashy BIG na banheira, é importante garantir que esteja totalmente rodado para a posição “bloqueado” quando estiver fora da banheira.

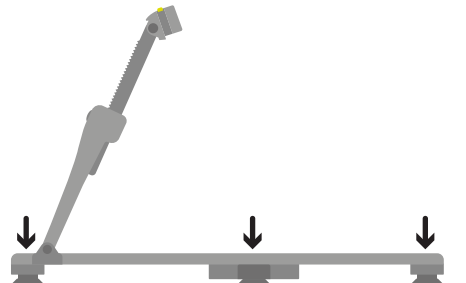


Continuação →

09.2.2 Usar a função de estabilizador




Use sempre o estabilizador quando o Splashy BIG estiver a ser usado fora do banho para limitar qualquer risco de queda.

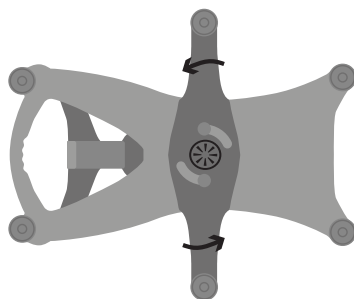

Certifique-se que ouve o clique sonoro ao bloquear o estabilizador

09.2.3 Colocação do fixador ao piso

Depois de o fixador ao piso estiver colocado, certifique-se de que o braço de inclinação está na posição mais alta.

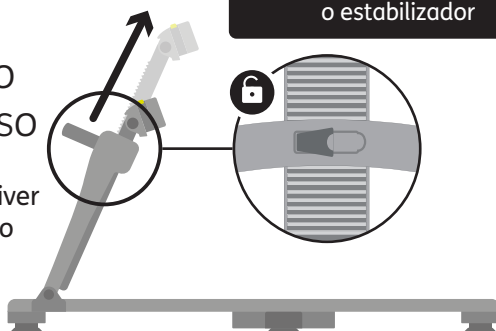

09.2.4 Montagem do assento Splashy BIG


1

Antes de fixar o Splashy BIG no fixador ao piso, deve montar o encosto e a base do assento.

2


Segure o encosto do Splashy BIG verticalmente com as ranhuras no topo. Use a outra mão para encaixar a base do assento nas ranhuras do encosto.

Vire a base do assento na direção oposta para bloquear a ligação. Depois de ligado, insira a aba da espuma da dobradiça sob a capa do encosto de espuma.

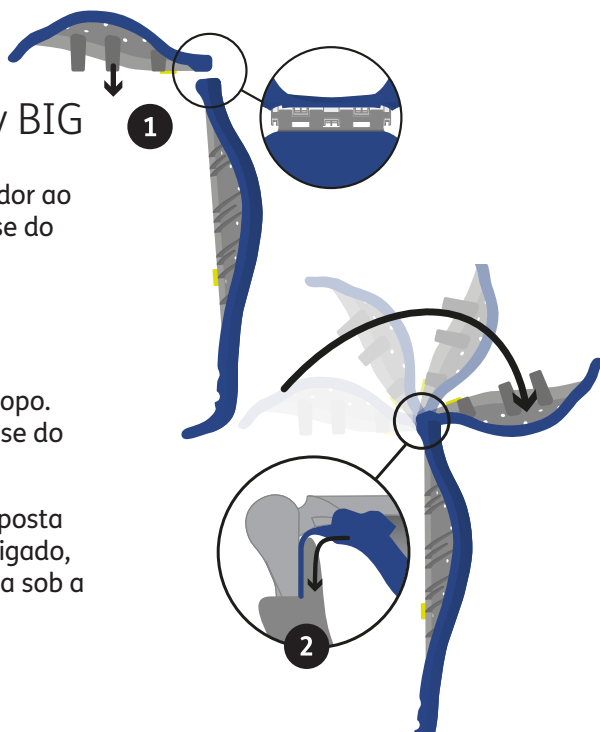


09.2.5 Encaixar e configurar os arneses e os amortecedores


- 1** Para prender qualquer uma das correias de suporte e os amortecedores na base do assento e no encosto do Splashy BIG, passe o fecho pelo furo respetivo.
- 2** Segure rodando a alavanca lateralmente sob o assento.

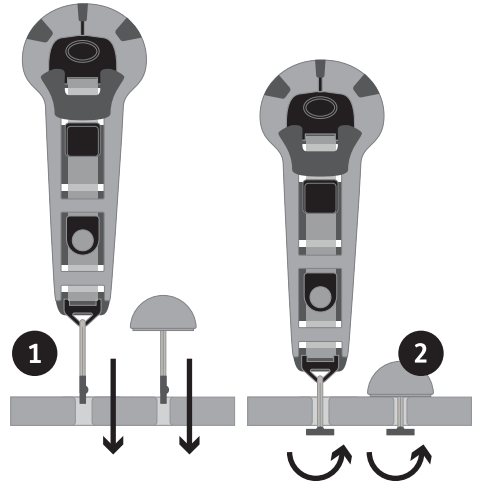

Para ligar o ombro e as tiras laterais, siga este diagrama.

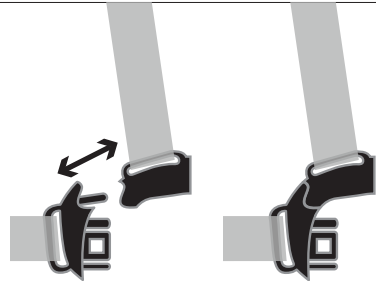


Para garantir que está a colocar as correias no lado correto do Splashy BIG, a fivela deve aparecer como na foto.

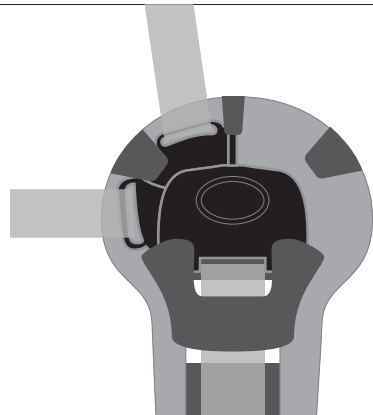


09.2.6 Configurar os arneses de 5 pontos

- 1 Insira o fecho da virilha na base do assento Splashy BIG.
- 2 Insira o fecho da tira do ombro esquerdo através do furo na altura correta para o seu filho.
- 3 Insira o fecho da tira lateral esquerda num dos furos nos painéis laterais do encosto.
- 4 Repita o processo para o ombro direito e tiras laterais.
- 5 Depois de todas as tiras estarem firmemente colocadas, segure todas as tiras em conjunto usando a fivela para criar um arnês de 5 pontos.
- 6 As tiras podem ser totalmente ajustadas libertando o grampo, apertando ou soltando a tira, dependendo dos requisitos. Certifique-se de que o grampo está fechado quando a tira for ajustada.

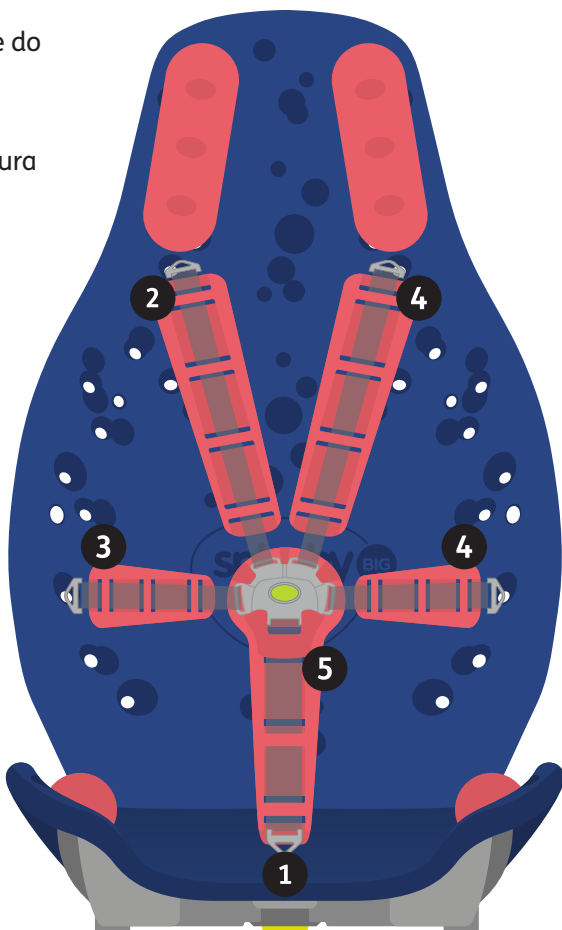


Dica – Quando estiver satisfeito com o ajuste, pode passar a restante secção da tira pela secção de espuma do arnês para a manter arrumada.

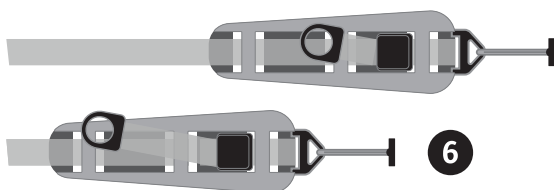

09.2.7 Configurar os arneses de 3 pontos




- 1** Insira o fecho da tira lateral esquerda num dos furos nos painéis laterais do encosto.
- 2** Repita o processo para a tira lateral direita.
- 3** Depois de todas as tiras estarem firmemente colocadas, segure todas as tiras em conjunto usando a fivela para criar um arnês de 3 pontos.

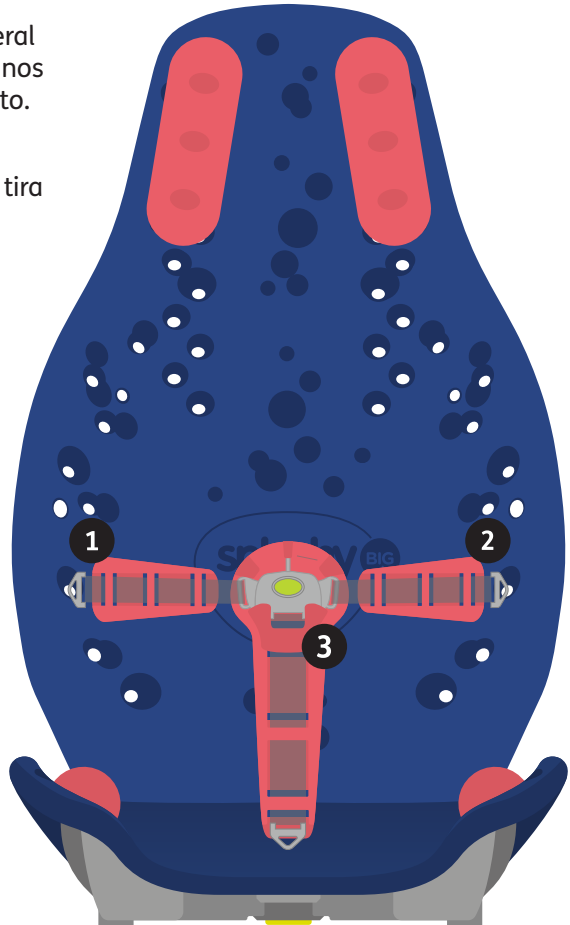


Não ajuste a configuração de um arnês de 5 pontos para um arnês de 3 pontos enquanto a criança estiver no assento do banho.

09.2.8 Encaixar o assento Splashy BIG no fixador ao piso

- 1 Desça o Splashy BIG com a base do assento plano sobre o fixador ao piso.
- 2 Certifique-se de que a base do assento está alinhada centralmente com o fixador ao piso, movendo a base do assento para a frente para que esta deslize para dentro do canal de bloqueio.
- 3 Quando a base do assento fica encaixada no fixador ao piso, ouve-se um clique que significa que o fecho foi acionado.

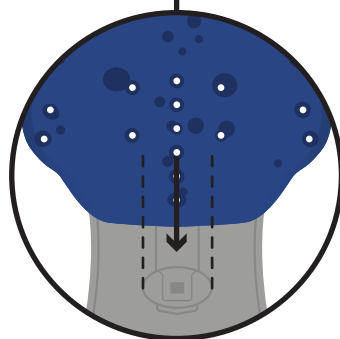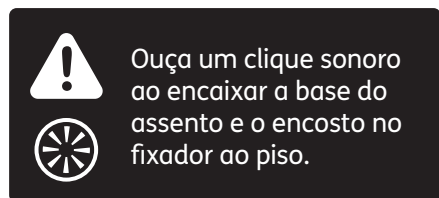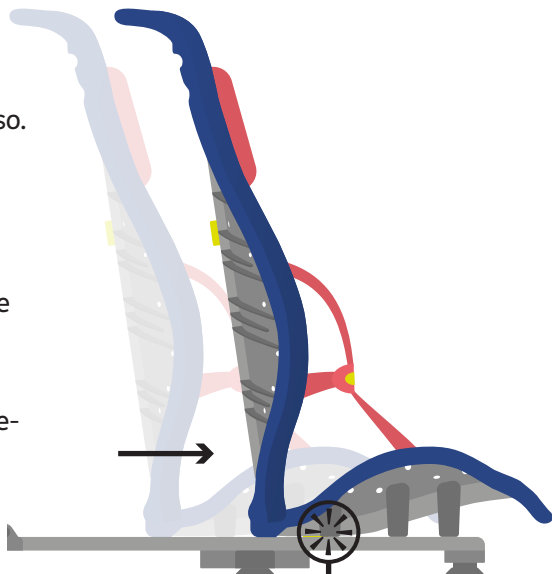


Antes de acoplar o braço de inclinação ao encosto, assegure-se de que este se encontra na posição mais alta. Uma vez acoplado corretamente, ouvirá um clique.

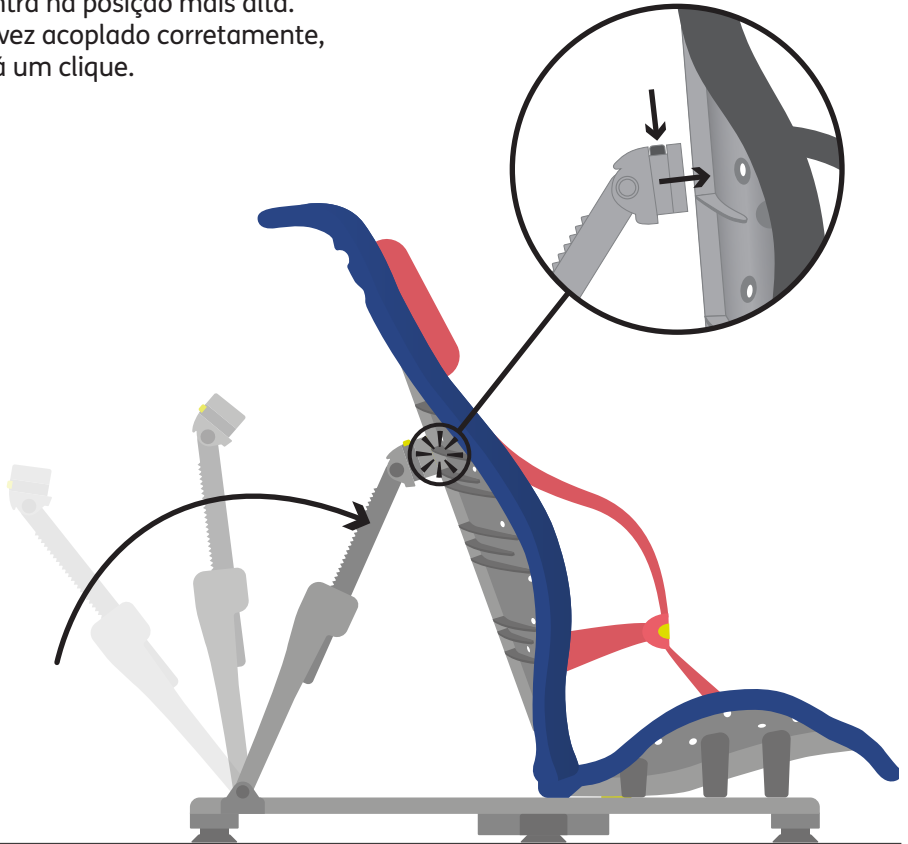

Esta imagem mostra como deve ficar o assento de banho quando está totalmente montado.

Neste momento já é seguro colocar o seu filho no Splashy BIG.

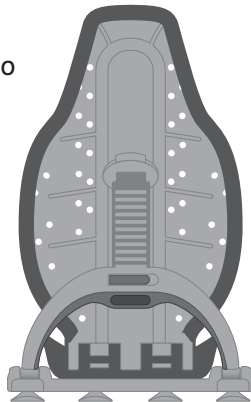

09.3 Suportes amortecedor

Se acreditar que o seu filho precisa de mais apoio no Splashy BIG, pode adquirir amortecedores extras na secção Acessórios no site da Firefly.

www.fireflyfriends.com/uk/our-products#accessories



09.3.1 Ajustar os amortecedores para mais suporte em vários locais

Os amortecedores podem ser usados como:





1. **Encosto da cabeça** - coloque um amortecedor no lado direito e esquerdo da cabeça do seu filho.

2. **Suporte para o pescoço** - coloque um amortecedor lateralmente na nuca do seu filho.

3. **Pommel (sela)** - coloque um amortecedor entre as pernas do seu filho (ajuda a evitar que cruze as pernas).

4. **Guias das pernas** - coloque um amortecedor no lado direito e esquerdo das pernas do seu filho (ajuda a evitar que caiam ao longo do assento da banheira).

5. **Prateleira anti-deslizante** - coloque um amortecedor lateralmente na base do assento de banho em frente às nádegas do seu filho (ajuda a evitar que as nádegas do seu filho deslizem para a frente no assento). Algumas crianças podem considerar o Splashy BIG mais confortável se for colocado um amortecedor na frente da tira da virilha.

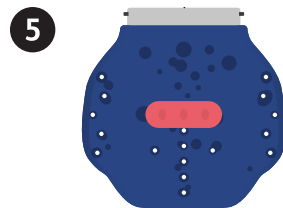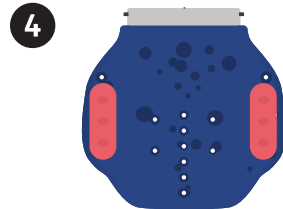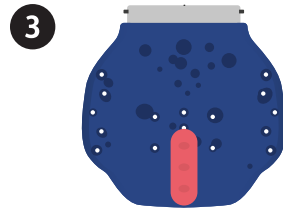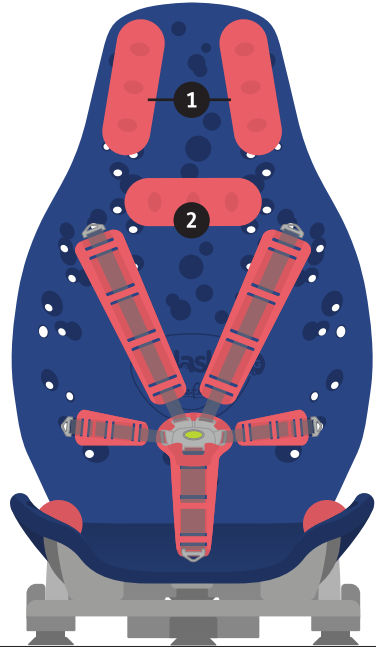

09.4 Ajustar o arnês para tomar banho

Retire uma tira do ombro para
fazer um arnês de 4 pontos
para aumentar o acesso ao
banho.

Para retirar a tira de ombro,
liberte a alavanca do fecho
do encosto.




Retire uma tira lateral para fazer um arnês de 4 pontos para aumentar o acesso ao banho da metade inferior do corpo.

Para retirar a tira lateral, liberte a alavanca do fecho do encosto.



09.5 Encurtar as tiras laterais e dos ombros

Em alguns casos, pode querer reduzir o tamanho dos apoios laterais e dos ombros para encaixar uma criança mais pequena e usar o Splashy BIG.

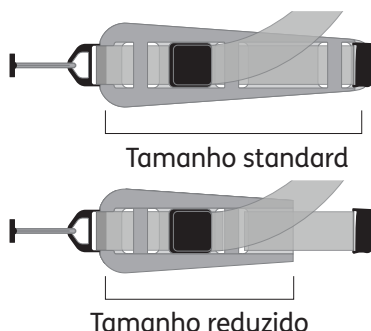


1 Quando o seu Splashy BIG for entregue, as tiras terão o aspeto do diagrama apresentado. Para ajustar as tiras para uma configuração mais pequena, siga estas instruções.




2 Remova a secção destacada da tira da espuma.




3 Dobre a extremidade mais fina da espuma para trás e certifique-se de que as aberturas estão alinhadas.

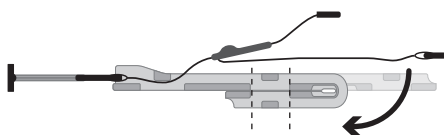

4 Passe as tiras através da primeira abertura na espuma dobrada.


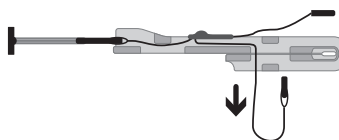


5 Depois de terem sido puxadas completamente, passe através da segunda abertura e puxe para apertar.

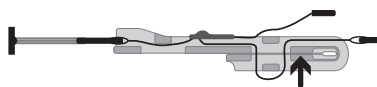


09.5.1 Encurtar a tira da virilha

Em alguns casos, pode querer reduzir o tamanho da tira da virilha para encaixar uma criança mais pequena e usar o Splashy BIG.

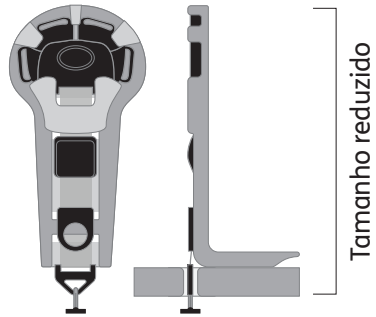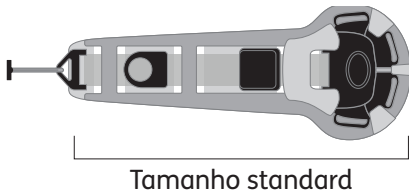


- 1 Na entrega a tira da virilha tem o aspeto do diagrama seguinte. Para ajustar as tiras para uma configuração mais pequena, siga estas instruções.
- 2 Remova a secção destacada da tira da espuma.
- 3 Dobre a espuma para trás para criar uma tira de virilha mais pequena e passe-a para trás através do orifício da base do assento.

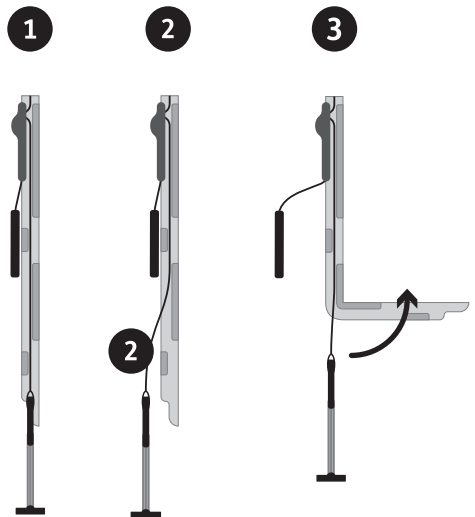


09.6 Posições reclinadas recomendadas


Posição vertical - se o seu filho tiver boa tolerância ao sentar e controlo do tronco, poderá conseguir usar uma posição sentada vertical.

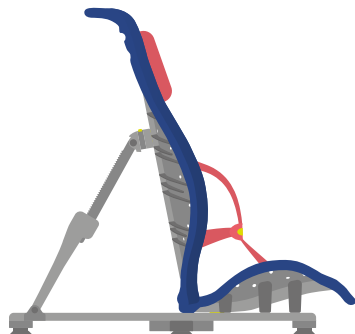

Posição reclinada média - recomendamos que o Splashy BIG seja colocado numa posição de reclinação média se o seu filho tiver que ser levantado para o assento de banho.

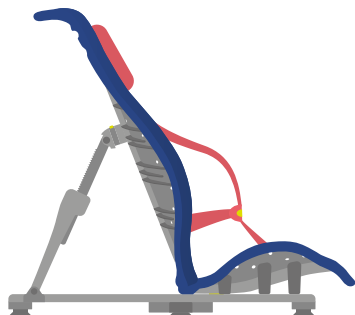

Posição reclinada total - recomendamos que o Splashy BIG seja colocado numa posição de reclinação total se o seu filho tiver que ser içado para o assento de banho.

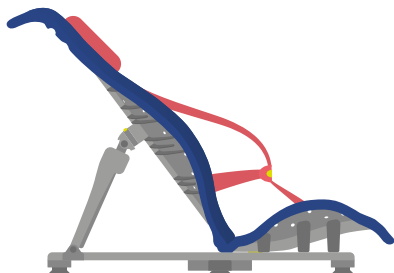


09.6.1 Usar a função de reclinção do Splashy BIG

Quando o seu filho estiver totalmente seguro e suportado, a função de reclinção do Splashy BIG poderá ser usada.


Cuidado ao alterar o ângulo de reclinção. Deve procurar tornar este movimento o mais suave possível para reduzir qualquer ansiedade que a criança possa ter.

Para trazer o Splashy BIG para uma posição mais direta, coloque uma mão na pega do Splashy BIG **A** na parte superior do encosto para suporte, e a outra mão no clipe verde no braço reclinado do fixador ao piso. **B**

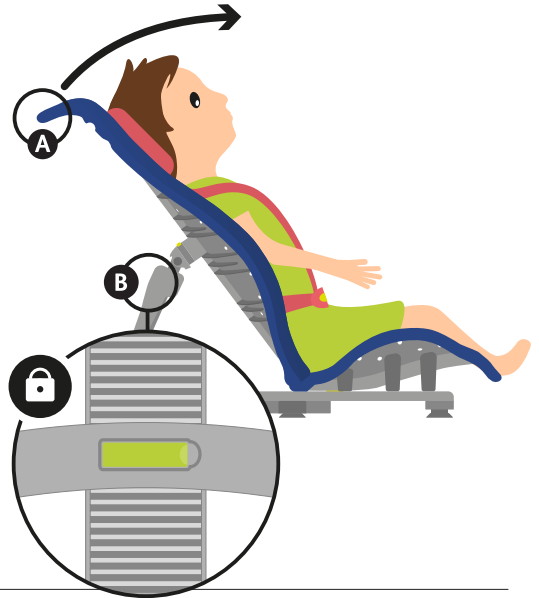

Liberte o clipe e coloque o assento de banho na posição vertical adequada para o seu filho. **A**

Aperte o clipe no fixador ao piso. Irá ouvir um clique depois de completamente engatado.

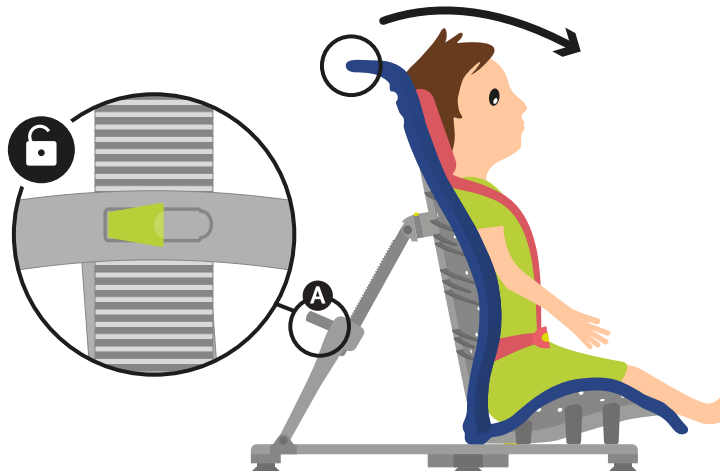

09.7 Remover o Splashy BIG da banheira depois da utilização e desmontagem


Não retire o Splashy BIG da banheira antes de desencaixar a base do assento e o fixador, porque isso pode sobrecarregar as ligações.

Liberte e retire a criança do Splashy BIG e esvazie a banheira.




Consulte a Secção 7 para saber como o fazer em segurança.

Para libertar o Splashy BIG do fixador ao piso, pressione o botão verde no braço reclinado e puxe o encosto para a frente.

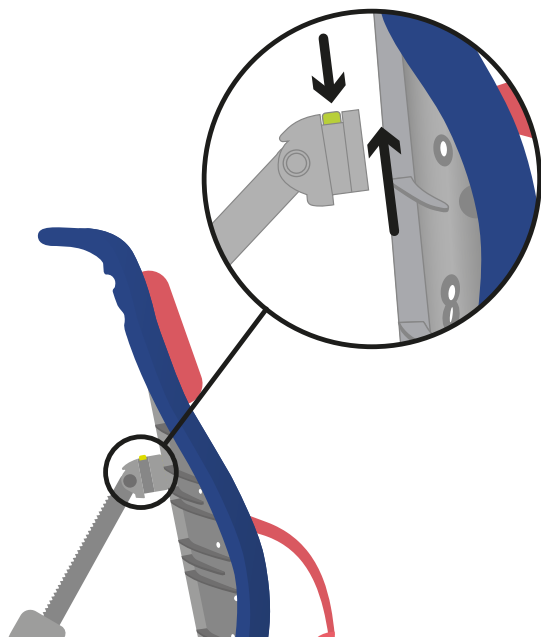


Para libertar a base do assento, **A** puxe a aba plástica verde e deslize para trás, levantando de seguida o Splashy BIG do piso. **B**

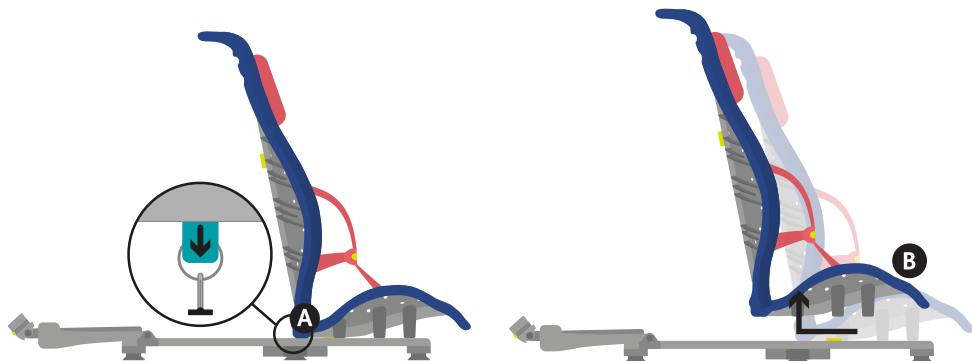


Certifique-se que não força o quadro da banheira, pois isso pode sobrecarregar as ligações.

Para remover o fixador ao piso da banheira, deslize suavemente a sua mão sob os pés de borracha e estes serão libertados. (não usar ferramentas)

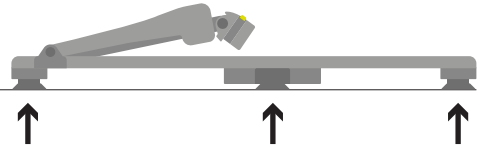

Coloque o Splashy BIG de lado e retire a base do assento do encosto traseiro, soltando a base do assento sobre si mesma para libertar o mecanismo da dobradiça.

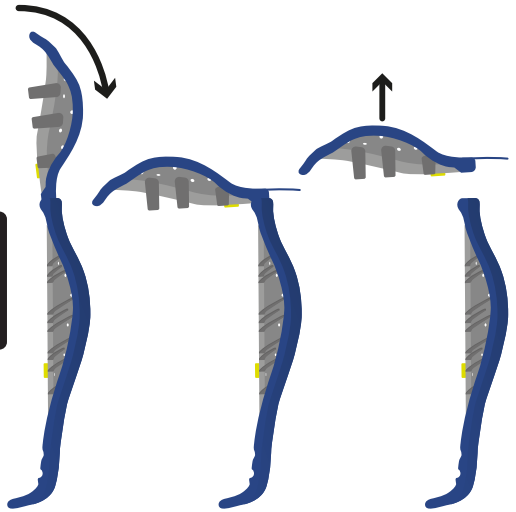

O não cumprimento destas instruções pode invalidar a sua garantia.

09.8 Esvaziar e secar

Certifique-se sempre que limpa/lava o Splashy BIG antes de o esvaziar e armazenar.

O fixador ao piso pode ser seco. (Consulte a Secção 05 para mais orientações).





Para guardar o fixador ao piso quando não estiver em utilização, deslize o braço de reclinção para baixo e coloque-o na horizontal.

09.9: Pés de exterior do fixador ao piso




Nunca toque nos dois pés centrais, verifique se estão todos seguros.

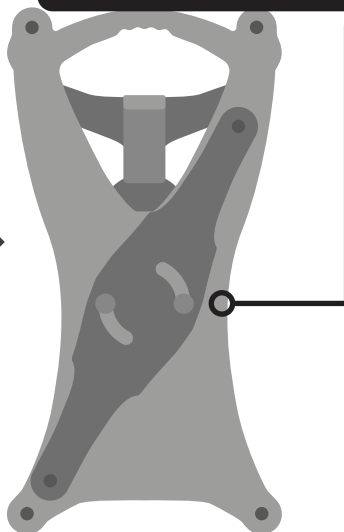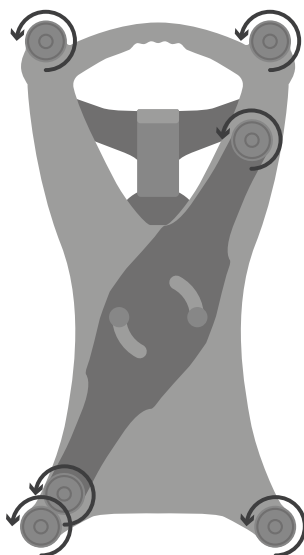

1 Remova os 6 pés de ventosa do fixador ao piso.

2 Adicione os pés de exterior, enroscando para a direita.

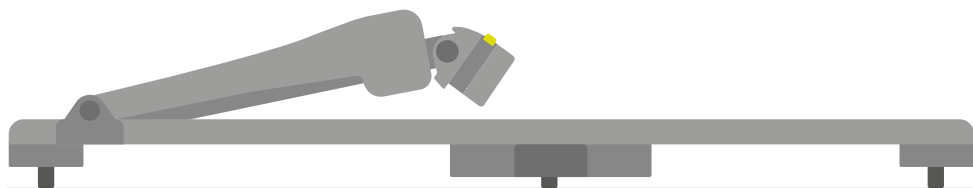

3 Certifique-se de que todos os pés estão engatados e que o fixador está recolhido.



Não use os pés do exterior na banheira / chuveiro. Use pés de ventosa do fixador ao piso originais.

10: Informação de tamanho

Informação técnica do assento para banho Splashy BIG	
Altura do encosto do assento	720mm (28.5 polegadas)
Largura do encosto do assento	450mm (17.5 polegadas)
Profundidade base do assento	400mm (15.5 polegadas)
Largura base do assento	450mm (17.5 polegadas)
Largura do fixador ao piso	420mm (16.5 polegadas)
Largura do fixador ao piso com estabilizador	665mm (26 polegadas)
Comprimento do fixador ao piso	795mm (31 polegadas)
Peso máximo	55kg (121lbs)
Intervalo de idades	7-14 anos



Firefly Friends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com

fireflyfriends.com



LS594-02

