



Scoot

Manual do usuário



Family Freedom



Leia cuidadosamente todas as instruções antes de usar o Scooot. Todas as instruções podem ser encontradas no nosso site www.firetyfriends.com juntamente com vídeos, diagramas e FAQs.

Conteúdos

01 Utilização prevista	p.93
02 Declaração de conformidade	p.94
03 Termos de garantia	p.94
04 Informação de segurança	p.95
05 Informação sobre limpeza e cuidados	p.96
06 Inspeção diária e manutenção do produto	p.97
07 Reutilização de produtos Firefly	p.98
08 Assistência a produtos	p.98
09 Instruções para utilização	p.99
9.1 Como saber se o Scooot é adequado para o seu filho	p.99
9.2 Como desembalar e montar o seu Scooot	p.100
9.3 Transferir o seu filho para o Scooot	p.106
9.4 Como usar o Scooot	p.110
10 Informação técnica	p.111
11 Perguntas frequentes	p.112

SECÇÃO 01:

Utilização Prevista

O Scoot é um andador de mobilidade 4-em-1 desenhado para permitir que crianças com necessidades especiais brinquem, explorem e participem de forma adaptada às suas capacidades físicas e cognitivas.

O Scoot não deve ser usado em terrenos acidentados ou irregulares. São recomendadas para o Scoot superfícies lisas, como decks de madeira ou de betão.

Nas duas configurações, existem quatro funções diferentes: Crawl (gatinhar), Scoot, Ride (passar) e Poosh.

Crawl (gatinhar): Deitado sobre a barriga e propulsionado com os braços e os pés

Scoot: Sentado e propulsionado com os pés

Ride (passar): Sentado e autopropulsionado com as rodas


Poosh: Sentado na configuração Ride (passar) e sendo empurrado por um adulto usando a pega de empurrar

O Scoot é geralmente adequado para crianças de 2-6 anos, embora dependente do nível de desenvolvimento físico da criança, largura da anca e comprimento da perna (para mais informações consulte a Secção 10).


Peças do Scoot



Encosto

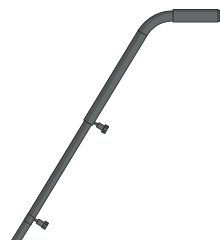


Cabo Poosh

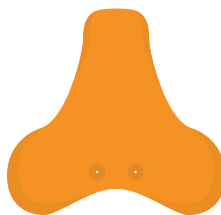

Base Scoot



Revestimento almofadado

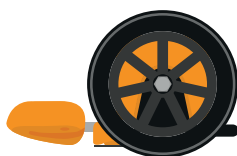

Montagem da roda

Recomendamos que o adulto responsável efetue inspeções diárias do produto (de acordo com a Secção 6 deste manual) para garantir a utilização segura do produto.

A James Leckey Design Ltd não se responsabiliza se o produto não for utilizado de acordo com as instruções de segurança e os fins previstos. Em caso de dúvida contacte o Serviço ao Cliente da Firely para o número UK 0800 318265 ou ROI 1800 626020 ou customer.enquiries@fireflyfriends.com.

SECÇÃO 02: Declaração de conformidade

A James Leckey Design Ltd, como fabricante com responsabilidade exclusiva pela marca Firefly, declara que o Scoot está em conformidade com os requisitos das Orientações da 93/42/CEE e da EN12182 Ajudas técnicas para pessoas com deficiência, Requisitos Gerais e Métodos de Teste.

SECÇÃO 03: Termos de garantia

UK / ROI: Os produtos podem ser devolvidos para reparação ou substituição ao abrigo da garantia até 12 meses após a sua receção. Em todos os casos, é da responsabilidade do cliente garantir que os produtos são devolvidos devidamente, corretamente embalados, de preferência, na embalagem original.

Clientes internacionais: Os produtos podem ser devolvidos para reparação ou substituição ao abrigo da garantia até 12 meses após a sua receção. Contacte connosco para obter um ID de referência de acordo com os procedimentos internacionais de devolução.

O cliente é responsável pelos custos da devolução dos produtos. Depois de devolvidos procederemos à sua reparação/substituição e respetiva devolução num prazo de 14 dias.

SECÇÃO 04: Informação de segurança

1. O não cumprimento das instruções pode colocá-lo, a si ou ao seu filho, em risco. Antes de usar, leia sempre as instruções do utilizador completas.
2. O Scoot deve ser sempre usado sob supervisão de um adulto.
3. Verifique se todos os componentes estão bem fixados antes de usar.
4. Não modifique o seu Scoot ou use componentes diferentes dos componentes Firefly aprovados. O Scoot não deve ser usado se tiver peças ou componentes avariadas.
5. Não tente usar acessórios alternativos se perder alguma peça do Scoot - sobre as peças de reposição disponíveis entre em contacto com o Serviço ao Cliente da Firely para UK 0800 318265, ROI 1800 626020 ou customer.enquiries@fireflyfriends.com
6. Mantenha os parafusos soltos, ferramentas e fixações fornecidos com o seu Scoot guardados e longe de crianças pequenas, pois os mesmos podem representar um risco de asfixia.

7. Não esqueça nunca que o Scoot não tem travões e que, por isso, só deve ser usado em superfícies planas e niveladas. O Scoot não deve ser usado em degraus ou escadas nem na sua proximidade.
8. Realize todos os ajustes posicionais e assegure-se de que a fivela do cinto está completamente presa e que o cinto está ajustado ao tamanho do seu filho enquanto ele estiver sentado. No formato Ride (passear), o apoio para os pés deve ser ajustado para que os pés do seu filho não fiquem estendidos para além do apoio para os pés.
9. O cabo Poosh deve ser usado apenas quando o Scoot estiver ajustado para a configuração Ride (passear), com o conjunto de roda maior. Não é seguro usar o cabo na configuração Scoot, que é destinada para crianças com capacidade de propulsão com as próprias pernas. Certifique-se de que o Scoot permanece firme ou apoiado contra uma parede antes de transferir o seu filho.
10. Se o seu filho estiver a usar o Scoot no exterior e autopropulsionado na configuração Ride (passear), é importante verificar sempre se as rodas estão limpas.
11. Quando não estiver a ser usado, o Scoot deve ser guardado cuidadosamente em local seco e longe de temperaturas extremas.
12. Verifique se o entorno é seguro antes de deixar o seu filho usar o Scoot. Os artigos domésticos ou os móveis podem representar perigo se tiverem cantos afiados ou criarem obstáculos.
13. Não force o movimento pois pode ferir o seu filho.
14. Por motivos de segurança, recomendamos que o seu filho use sapatilhas (ténis) ao utilizar o produto. Não é recomendado usar o produto com os pés descalços, sandálias ou chinelos.
15. Ao montar a configuração Ride (passear), certifique-se de que as fixações da proteção da roda estão firmes e que o apoio para os pés foi ajustado e protegido de acordo com a Secção 9.2.
16. Em caso de dúvida sobre o uso seguro do Scoot ou se alguma das peças não funcionar, deixe de usar o produto imediatamente e contacte o Serviço ao Cliente da Firely UK 0800 318265, ROI 1800 626020 ou customer.enquiries@fireflyfriends.com
17. O estofado do Scoot cumpre com a regulamentação de segurança contra incêndio de acordo com a EN1021-1. O produto deve ser mantido afastado de qualquer chama.
18. Limpe o produto regularmente de acordo com a Secção 5 deste manual. Não use produtos de limpeza abrasivos. Realize verificações de manutenção regularmente para garantir que o seu produto está em boas condições de funcionamento.



Quando uma criança estiver na configuração Poosh, certifique-se de que as mãos da criança estão longe da montagem da roda

SECÇÃO 05: Informação sobre limpeza e Cuidados

As superfícies em plástico do Scooot podem ser limpas com água morna e sabão e um pano macio ou esponja. Qualquer agente de limpeza abrasivo pode riscar ou marcar o Scooot.

Não limpe nenhuma das peças do Scooot com um agente de limpeza com lixívia.

Cinto e almofada da anca

- O cinto pode ser retirado do encosto para lavagem usando a ferramenta incluída no pacote de instruções. Mantenha os parafusos de fixação num local seguro e afastado das crianças.
 - Os estofos podem ser colocados na máquina de lavar e lavados a 40 °C ou menos. Quando lavar a almofada do Scooot ou o cinto pela primeira vez, lave-os separadamente de outras peças para reduzir o risco de perda da cor.
 - Não secar na máquina ou passar a ferro a almofada ou o cinto.
 - Retire as manchas o mais rapidamente possível, com um pano absorvente, toalha ou esponja. É suficiente passar uma esponja molhada em água quente e sabão em sujidade comum e pequenos derrames, mas com cuidado para não saturar o tecido e espalhar a mancha.
- Podem ser usados agentes de limpeza antissépticos em manchas mais resistentes. Certifique-se de que os produtos de limpeza são totalmente removidos.
 - Não use solventes para limpar ou remover manchas do cinto ou da almofada.
 - Não use lixívia no produto.
 - Não seque na máquina a almofada ou o cinto da anca.

SECÇÃO 06: Inspeção diária do produto

Recomendamos que sejam efetuadas diversas verificações ao Scoot antes da sua utilização para garantir que o produto é seguro. As verificações recomendadas são detalhadas abaixo.

Crawl (gatinhar)

1. Verifique se a almofada está bem fixa como mostrado na Secção 9.2.
 2. Verifique se o elástico não está solto ou em contacto com outros acessórios.
 3. Confirme se o elástico não está torcido.
 4. Verifique se o rodízio frontal está instalado e seguro.
-

Scoot

5. Assegure-se de que o encosto está bem preso e não se move.
 6. Se estiver a usar revestimento, faça também as verificações 1-3.
 7. Assegure-se de que o cinto está bem fixo ao encosto e que a fivela funciona corretamente.
 8. Verifique se o rodízio frontal está instalado e seguro.
-

Ride (passear)

9. Certifique-se de que as fixações para a montagem da roda estão seguras.
10. Confirme se o encosto está fixo de acordo com as verificações 5-8.
11. Se usar o revestimento, realize as verificações 1-3.

12. Verifique se o conjunto da roda está bem fixo (consulte a Secção 9.2, Passos 4-7).
 13. Certifique-se de que o apoio para os pés está ajustado para se adequar ao seu filho.
 14. Assegure-se de que o apoio para os pés está seguro.
 15. Verifique se o rodízio frontal foi removido da base.
-

Poosh

16. Assegure-se de que o encosto está fixo de acordo com as verificações 5-8.
 17. Assegure-se de que a pega de empurrar está segura conforme o passo 8 na pág. 15.
 18. Assegure-se de que os puxadores soft-touch na pega de empurrar estão bem fixos e aparafusados.
-

Almofada do encosto avançado

19. Assegure-se de que o revestimento da almofada do encosto avançado está ligado de acordo com a pág.15
20. Certifique-se de que os poppers nas laterais estão ligados corretamente de acordo com a pág.15

Em caso de dúvida sobre o uso contínuo e seguro do seu produto Firefly ou se alguma peça falhar, deixe de usar o produto imediatamente e entre em contacto com o Serviço ao Cliente o mais rapidamente possível.

SECÇÃO 07: Reutilização dos produtos Firefly

Limpe o produto cuidadosamente de acordo com a Secção 5 deste manual e certifique-se de que foi fornecida uma cópia deste manual com o produto. Em caso de dúvida sobre o uso contínuo e seguro do seu produto Firefly ou se alguma peça falhar, deixe de usar o produto imediatamente e entre em contacto com o Serviço ao Cliente para UK 0800 318265, ROI 1800 626020 ou customer.enquiries@fireflyfriends.com

SECÇÃO 08: Manutenção de produtos

Os produtos defeituosos podem ser reparados ou substituídos pela Firefly, se ainda estiverem abrangidos pela garantia. Pode ser necessário devolver o produto para a Firefly para uma inspeção mais detalhada que pode incorrer numa pequena taxa para transporte. Para assuntos relacionados com assistência técnica, contacte o Serviço ao Cliente para UK 0800 318265, ROI 1800 626020 ou customer.enquiries@fireflyfriends.com

Secção 9 Instruções para utilização

SECÇÃO 9.1: Como saber se o Scoot é adequado para o seu filho

Avaliação e prescrição

O Scoot é um produto de mobilidade precoce, desenhado para proporcionar às crianças uma experiência divertida e a oportunidade de se movimentarem de forma independente. O Scoot foi desenhado para crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 6 anos (dependendo do seu tamanho) e para os níveis I - IV do Gross Motor Function Classification System (GMFCS), dependendo do seu nível de desenvolvimento.

O seu filho vai aproveitar ao máximo o Scoot (em todas as configurações) se conseguir segurar a cabeça e tiver um nível razoável de controlo do tronco, o que significa que pode sentar-se com um pouco de apoio pélvico.

Se o controlo da cabeça do seu filho ainda estiver em desenvolvimento, recomendamos espere até melhorar antes de usar o Scoot.




Para mais informações, veja os vídeos online em www.firetyfriends.com.




SECÇÃO 9.2: Desembalar e montar o Scoot

Cuidado para não cortar a caixa, pois pode danificar algumas das peças internas. As peças estão embaladas em sacos de polietileno. Retire-as com cuidado da caixa e verifique se tem todas as peças necessárias.


Como montar o seu Scoot:
Selecione a configuração que pretende montar:

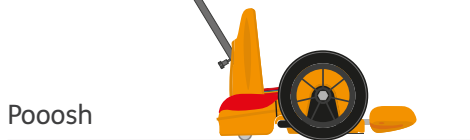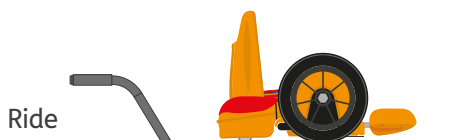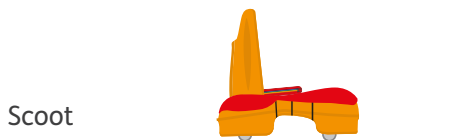

 Mantenha os sacos de polietileno afastados das crianças.

O seu Scoot vem com um pacote de instruções com todas as peças e ferramentas necessárias para a montagem.


Peças incluídas com o seu Scoot

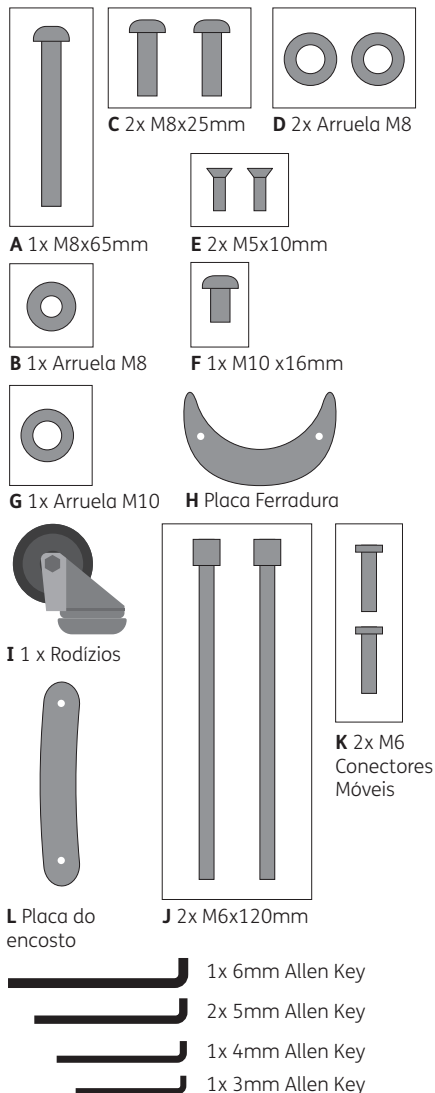

Passo 1

Se pretender usar o Scoot nas configurações Scoot ou Crawl (gatinhar), precisa de fixar o rodízio frontal. Pegue no rodízio I, no encaixe F e na arruela G e fixe à base do Scoot com a ferramenta incluída no pacote do utilizador.


O rodízio frontal não deve ser encaixado se estiver a usar o Scoot na configuração Ride (passar) ou Poosh.

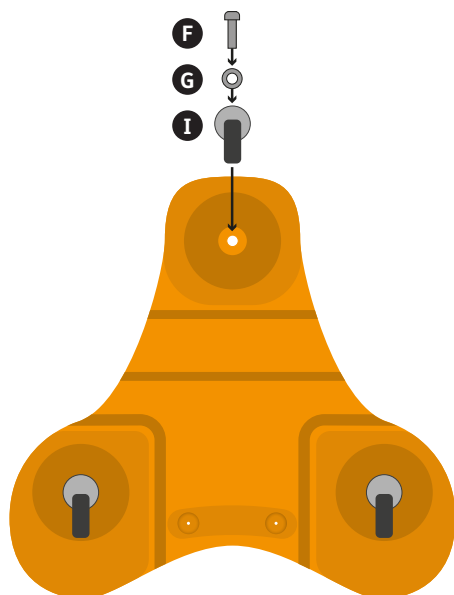

Passo 2

Coloque o revestimento acolchoado na base. Segure a almofada com as tiras elásticas com o lado macio voltado para cima. Alinhe a ranhura no estofo com os dois orifícios na parte superior da base.


O seu Scoot está agora pronto para ser usado na configuração Crawl (gatinhar).

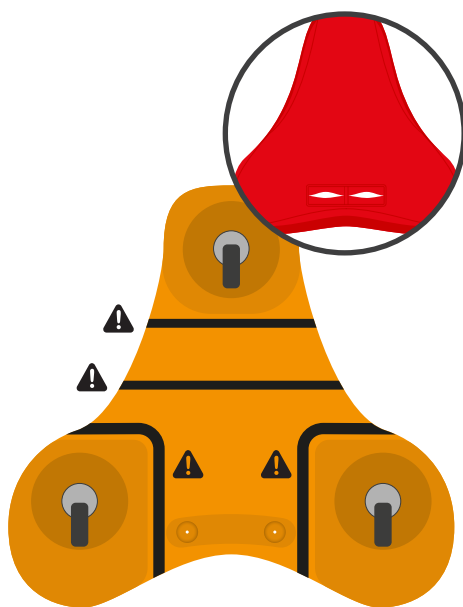

Monte o elástico como mostrado, confirmando que não prendem nos rodízios.


Passo 3

Para fixar o encosto, introduza os pinos do encosto nas ranhuras do estofo para que ambos assentem com segurança nos orifícios da base do Scoot.

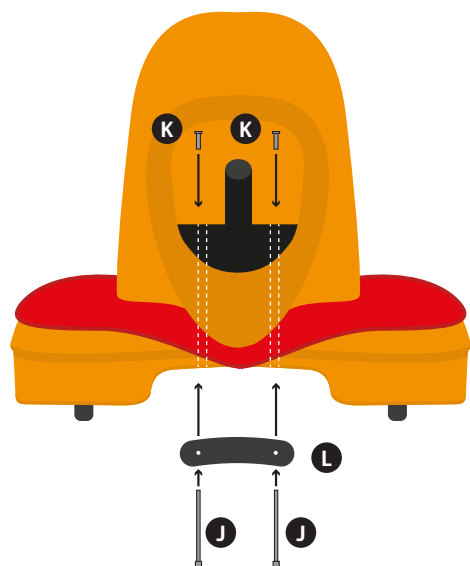

Fixe os conectores do encosto, do suporte e os móveis à parte inferior com a placa e os parafusos disponíveis. Use as ferramentas fornecidas para apertar os parafusos e fixar o encosto. Certifique-se de que o encosto não oscila.


É agora possível usar o produto na configuração Scoot.

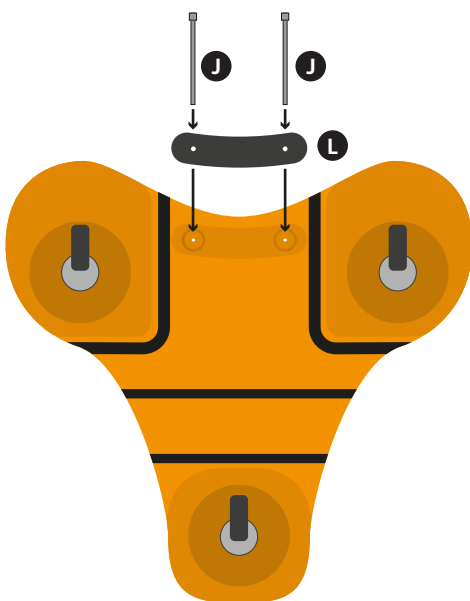

Se o encosto ainda se mover, aperte os parafusos até estarem muito bem apertados.

Passo 4

Deslize a base do Scoot para cima e sobre os três pinos salientes do conjunto da roda, para que encaixem nos orifícios correspondentes.

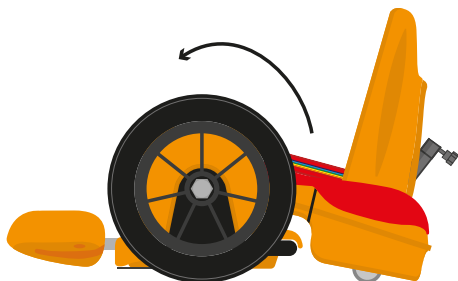


Passo 5

Vire o Scoot para aceder à parte de baixo. Usando os parafusos e arruelas assinaladas, fixe o Andador em três locais usando a ferramenta fornecida.




Confirme se o conjunto da roda está seguro.

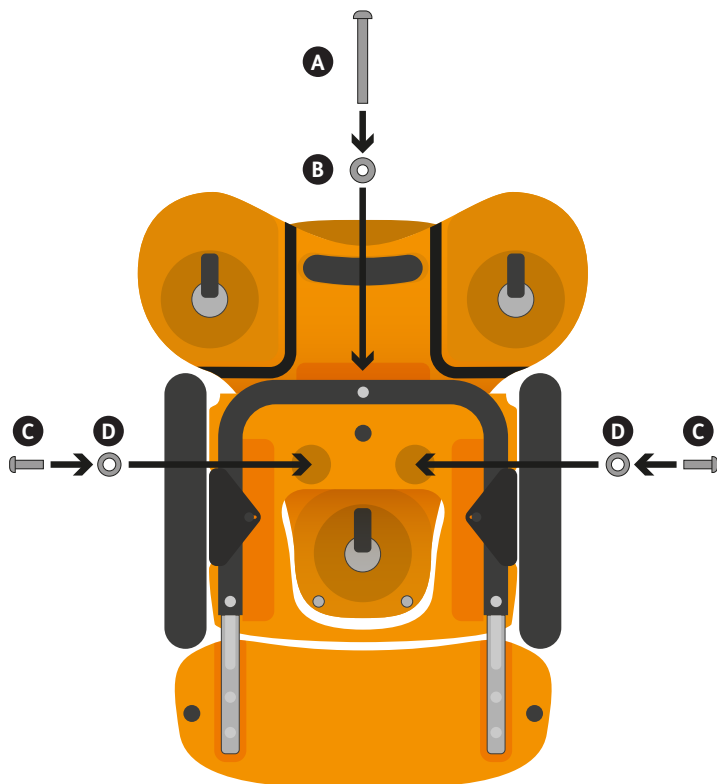

Passo 6

Ajuste o comprimento do apoio para os pés de acordo com o seu filho despertando os parafusos assinalados e deslizando o apoio para os pés para dentro ou para fora.

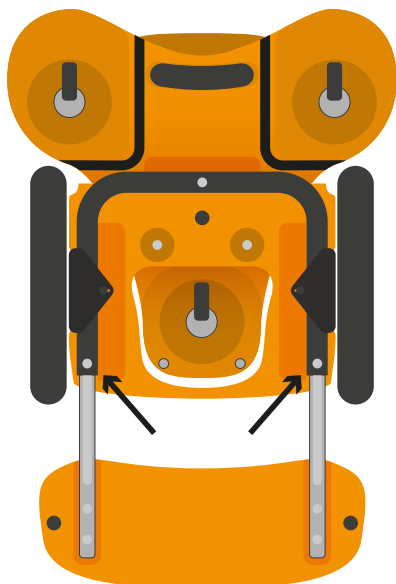

Certifique-se de que os parafusos estão bem apertados antes de deixar o seu filho usar o Scoot.


Passo 7

Use os dois fixadores (E) para prender a placa em ferradura (H) à frente do Scoot, como apresentado.

⚠ Na configuração Ride (passear) é necessário remover o rodízio frontal antes de usar o andador.

Remover o rodízio e os acessórios (partes F,G,I) e guardar num local seguro.


Pode agora usar o Sooot na configuração Ride (passear).

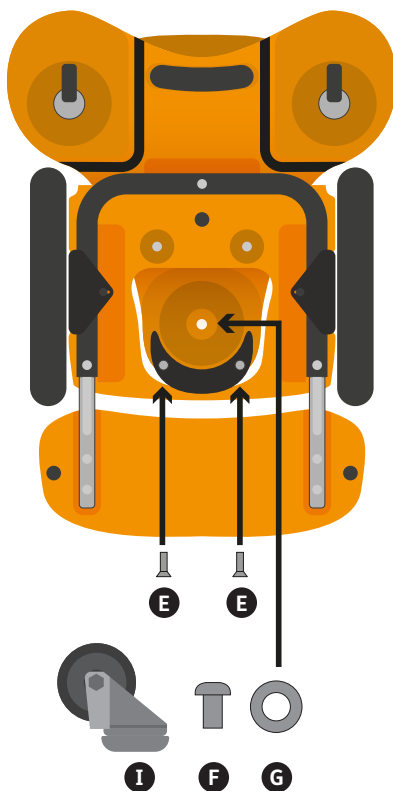

Passo 8

Para fixar a pega de empurrar, coloque o cabo no interior da área apresentada. Aperte o parafuso A para garantir que o cabo está seguro. Ajuste o cabo à sua altura e aperte com o parafuso B.

Certifique-se de que o cabo está seguro antes de usar.


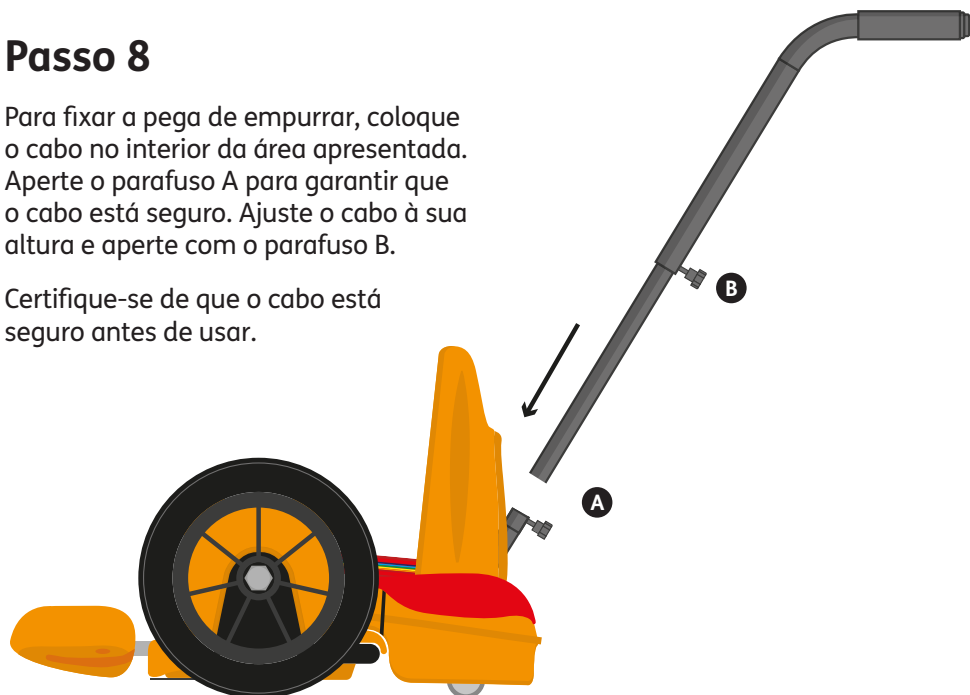


Fixar o encosto avançado

Se tiver escolhido a almofada de encosto avançado como acessório adicional, deslize-a para o encosto antes de colocar o encostado Scoot.

Puxe o revestimento sobre o encosto de plástico. Prenda o elástico para segurar o revestimento ao encosto. Prenda a ponta do revestimento à ponta do encosto. Coloque as suas laterais nas ranhuras mostradas e prenda-as aos poppers.

Para ajustar a altura das laterais, mova as laterais para cima e para baixo entre os quatro poppers.

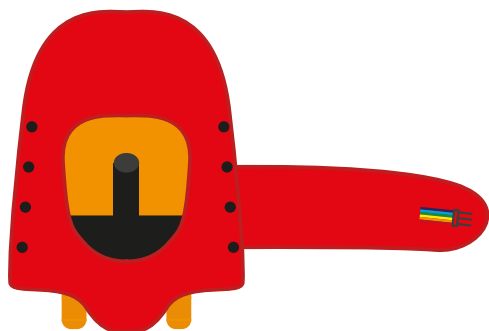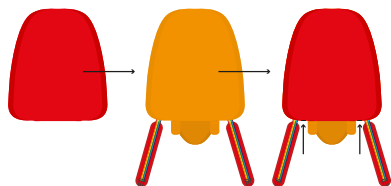

SECÇÃO 9.3: Transferir o seu filho para o Scoot

Antes de começar a usar o Scoot, certifique-se de que todos os componentes estão seguros e ajustados corretamente. Verifique se as tiras elásticas não estão danificadas, desgastadas ou rasgadas.

Se detetar algum sinal de danos, não use o produto e telefone para o Serviço ao Cliente para instruções. Posicione o Scoot para que não se mova enquanto transfere o seu filho para o mesmo. Mantenha-o firme ou coloque-o contra a parede para apoio extra.

1

Usar na configuração crawl (gatinhar)

O seu filho deve usar crawl (gatinhar) deitado sobre a barriga, como mostrado abaixo. A cabeça da criança fica voltada para a frente do Scoot (onde se encontra o logótipo da Firefly).

Não esqueça que o Scoot não tem travões, pelo que deve usar a configuração Crawl (gatinhar) apenas sobre superfícies planas. Supervisione o seu filho para garantir que não chegam aos rodízios.



2

Usar na configuração Scoot

Antes de usar o Scoot, prenda e ajuste todos os componentes conforme recomendado na Secção 9.2 e verifique se as tiras elásticas não estão danificadas, desgastadas ou rasgadas.

Se existir algum dano, não use o produto e entre em contacto com o Serviço ao Cliente para instruções. Posicione o Scoot para não se

mover enquanto transfere o seu filho para o mesmo.

Mantenha-o firme ou coloque-o contra a parede para apoio extra.

Certifique-se de que o encosto está bem preso seguindo as instruções de montagem do Passo 3 na Secção 9.2.

Abra o cinto e posicione o seu filho de modo a que as costas fiquem bem encostadas ao encosto.

Prenda o cinto em volta da cintura do seu filho. Prenda o conjunto e puxe os dois anéis D longe da fivela central para apertar o cinto, assegurando que o mesmo não fica torcido.

Ao usar o Scoot, o seu filho pode impulsionar-se para trás, para frente ou para os lados usando as pernas. Não esqueça que o Scoot não tem travões,

pelo que deve ser usado apenas sobre uma superfície plana. Supervisione o seu filho para garantir que não chegam aos rodízios.



Assegure-se de que o seu filho está confortável e estável na configuração Scoot antes de usar.

A configuração Ride (passear)

Ajuste e segure todos os componentes conforme recomendado na Secção 9.2 e verifique se as tiras elásticas não estão danificadas, desgastadas ou rasgadas. Se existirem danos, não use o produto e entre em contacto com o Serviço ao Cliente para instruções. Posicione o Scooot para que não se mova enquanto transfere o seu filho para o mesmo.

Ajuste o apoio para os pés de acordo com o comprimento das pernas do seu filho, para que os pés do seu filho não fiquem estendidos para além do apoio para os pés. Consulte os Passos 4-6 da Secção 9.2.

Abra o cinto e assegure que está afastado da área de assento. Coloque o seu filho com as costas contra o encosto.

Prenda o cinto em volta da cintura do seu filho. Aperte em conjunto e afaste os dois anéis D do centro da fivela para apertar o cinto, garantindo que o cinto não fica torcido.

Ao usar a configuração Ride (passear), as crianças conseguem impulsionar-se a si mesmas usando as rodas. Empurrar ambas as rodas para a frente, resulta num movimento para a frente e empurrar para trás resulta num movimento para trás. Empurrar para a frente na roda direita resulta numa curva para a esquerda e empurrar para a frente na roda esquerda resulta numa curva à direita. Empurrar para trás na roda direita resulta numa curva para a direita e empurrar para trás na roda esquerda resulta numa curva à esquerda.



Garanta que seu filho está confortável e estável na configuração Ride (passear) antes de usar.

4

Pooosh

Cumpra as instruções de transferência de acordo configuração Ride (passear). Certifique-se de que o cabo de empurrar está bem encaixado no encosto antes de colocar o seu filho no Scoot. Certifique-se de que ambos os puxadores no cabo de empurrar estão bem seguros e fixos.

É necessário que um adulto ou uma criança mais velha empurre e supervisione sempre a criança enquanto esta estiver no Scoot.

Lembre-se de que não há travões no Scoot, pelo que deve usar a configuração Ride (passear) numa superfície plana. Supervisione o seu filho até que ele ser capaz

de se movimentar sozinho.



Atenção à colocação das mãos do seu filho ao usar a função Pooosh. Certifique-se de que não se encontram próximas dos raios das rodas para minimizar o risco de as mãos ficarem presas.



Quando uma criança estiver na configuração Pooosh, certifique-se de que as mãos da criança estão longe da montagem da roda

SECÇÃO 9.4: O Scoot e o desenvolvimento do seu filho

Independentemente da configuração do Scoot que o seu filho estiver a usar, ele terá a oportunidade de desenvolver capacidades físicas, cognitivas e sensoriais enquanto se diverte muito.

O movimento ativo é conhecido por contribuir para o desenvolvimento cognitivo - ajuda as crianças a aprender instruções direcionais (para a frente, e para trás, etc.), bem como a percepção de profundidade e distância necessária para contornar obstáculos. Ao fazê-lo, a consciência corporal melhora à medida que o seu filho percebe melhor como se relaciona com o ambiente. Isto traduz-se mesmo em manipulação e coordenação olho-mão. Além disso, em toda a variedade de configurações, pernas, braços, pescoço, barriga e costas podem fazer pequenos exercícios. Nas configurações Crawl (gatinhar) e Ride (passear), as pequenas mãos são expostas a uma gama mais ampla de experiências sensoriais e de fortalecimento dos ombros - o que também se traduz em melhoria das capacidades de manipulação.

Dito isto, as crianças que vimos no Scoot não estão interessadas em nada disto - estão é muito ocupadas a dar voltas e a correr com os seus irmãos ou irmãs e a apreciar a liberdade que a mobilidade independente significa.

SECÇÃO 10: Informação técnica

Distância de ajuste da platina do encosto (comprimento da perna sentado das costas até aos pés)	Ajuste mínimo: 520 mm Ajuste máximo: 630 mm (para a frente do apoio para os pés)
Largura do arco da roda	230mm
Largura do assento	230mm
Largura max recomendada da anca	260mm
Largura do encosto	300mm
Tamanho do rastro	Crawl (gatinhar): L 460mm / W 450mm / H 160mm Scoot: L 460mm / W 450mm / H 320mm Ride (passear) (no ajuste mínimo): L 620mm / W 450mm / H 320mm Ride (passear) (no ajuste máximo): L 730mm / W 450mm / H 320mm
Medidas adicionais	Encosto: W 260mm Laterais do encosto avançado W 420mm Cabo Poosh: A 890 mm (max desde o chão) A 800 mm (min desde o chão)

SECÇÃO 11: Perguntas mais frequentes

1. Como saber se o Scooot é adequado para o seu filho?

O Scooot é um produto de mobilidade precoce, desenhado para proporcionar às crianças uma experiência divertida e a oportunidade de se movimentarem de forma independente. O Scooot foi desenhado para crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 6 anos (dependendo do seu tamanho) e para os níveis I - IV do Gross Motor Function Classification System (GMFCS) dependendo do seu nível de desenvolvimento.

O seu filho vai aproveitar ao máximo o seu Scooot (em todas as configurações) se conseguir segurar a cabeça e tiver um nível razoável de controlo do tronco, o que significa que pode sentar-se com um pouco de apoio pélvico.

O seu filho terá dificuldade em utilizar o Scooot em qualquer configuração, se tiver um controlo limitado da cabeça e do tronco ou da capacidade de ficar sentado.

No entanto, como as capacidades do seu filho ainda podem estar a surgir, poderão conseguir estar no Scooot durante curtos períodos de tempo antes de ficarem cansados.

Está tudo bem! Siga o ritmo deles e muito rapidamente vai poder ver as capacidades e a resistência necessárias.

Para mais informação sobre a utilização do Scooot, consulte os vídeos online em www.fireflyfriends.com.

2. Existe alguma razão para não usar o Scooot?

Se o seu filho tiver extremos de tónus, ou tiver sido submetido a alguns tipos de cirurgia (para os isquiotibiais curtos, por exemplo), recomendamos que procure alguma orientação do seu fisioterapeuta e/ou médico.

3. Durante quanto tempo o meu filho pode usar o Scooot?

Isto pode variar dependendo das capacidades do seu filho, do seu humor e da hora do dia. Deixe-se levar pelo seu filho, mas evite deixá-lo demasiado cansado, porque isso pode afetar as suas capacidades em outras atividades diárias.

4. Quantas vezes por semana posso usar o Scooot?

O seu filho pode gostar de usar o Scooot com frequência, e nesse caso o uso diário pode ser adequado. Se o seu filho tiver capacidades posturais emergentes ou problemas sensoriais, pode precisar de andar mais devagar.

5. O meu filho não gosta de uma das configurações. O que devo fazer?

O Scoot é uma atividade divertida que traz benefícios terapêuticos. É muito provável que a criança não goste da configuração Crawl (gatinhar), por ser muito difícil segurar a cabeça contra a gravidade nesta posição. Se pretender trabalhar no controlo da cabeça, então pode querer encorajar esta posição pouco a pouco, mas sem forçar o seu filho. Não é necessário usar o Scoot em todas as configurações.

6. O meu filho tem um tónus muscular muito alto/baixo. Pode usar o Scoot?

Se o seu filho tiver extremos de tónus, pode achar difícil usar o Scoot. Em caso de dúvida, consulte o seu terapeuta.

7. Posso usar o Scoot no exterior?

O Scoot pode ser usado no exterior em superfícies planas e niveladas. O cascalho e a relva não são recomendados. Se o seu filho é autopropulsionado, é importante que verifique sempre se as rodas estão sempre limpas.





Firefly Friends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com

fireflyfriends.com



LS602-05

